

## Opatrunek Aquacel Ag+ Extra 15x15 1 sztuka



Cena: 51,13 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Convatec
Substancja czynna	Emplastri collagenosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Aquacel, extra Ag+ opatrunek ze srebrem 15x15cm - 1 sztuka

Rozmiar: 15x15cm

### Opis produktu:

- **Aquacel Ag** to antybakteryjny opatrunek, łączący skuteczność srebra jonowego w zwalczaniu infekcji z unikalnymi korzyściami Technologii Hydrofiber (sieć nietkanych włókien o wyjątkowych zdolnościach chłonnych)

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

### Właściwości:

- w kontakcie z wydzieliną z rany opatrunek przybiera postać spoiściego żelu
- właściwości żelujące sprzyjają powstawaniu optymalnego środowiska dla procesu gojenia rany
- wersja ze srebrem przeznaczona do ran zagrożonych infekcją lub zakażonych, działa bakteriobójczo
- opatrunki zamykają wysięk z rany, bakterie oraz szkodliwe komponenty w strukturze opatrunku, minimalizując zagrożenie

#### zakażeniem krzyżowym

- dopasowują się do łożyska rany zapewniając odpowiedni poziom wilgotności rany, eliminują martwe przestrzenie, w których mogą namnażać się bakterie
- przeznaczony jest do leczenia ran z wysiękiem umiarkowanym lub obfitym.

## Zastosowanie:

- rany zainfekowane lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji
- oparzenia częściowe (drugiego stopnia)
- cukrzycowe wrzody stóp, wrzody nóg (spowodowane zastojem wrzody żylny, wrzody tętnicze i wrzody nóg powstające z różnych przyczyn) oraz odleżyny (częściowe i pełnej grubości)
- rany operacyjne, rany pourazowe
- rany narażone na krwawienie, np. na skutek mechanicznego lub chirurgicznego oczyszczenia
- rany onkologiczne z wysiękiem, np. skórne guzy grzybiaste, rak powikłany grzybicą, przerzuty skórne, mięsak Kaposiego, mięsak naczyńniowy

## Sposób aplikacji:

- ranę należy przemyć środkiem dezynfekującym.
- osuszyć dokładnie zdrową skórę wokół rany.
- rozmiar opatrunku powinien być tak dobrany aby 1-2 cm opatrunku pozostał na zdrowej skórze.
- opatrunek przykryć odpowiednim opatrunkiem wtórnym (gaza + bandaż).
- opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni

## Przeciwwskazania:

- Opatrunku Aquacel Ag Extra nie należy stosować u osób wrażliwych bądź wykazujących reakcje alergiczne na srebro lub karboksymetylocelulozę sodową
- Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta

## Środki ostrożności:

- należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:
- rany drążące, tunelowe lub głębokie
- jednoczesne stosowanie z produktami na bazie oliwy, np. wazeliną
- jeśli występują trudności przy zdejmowaniu opatrunku, należy całkowicie nasączyć opatrunek sterylnym roztworem soli fizjologicznej lub wodą

## Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku.

- brak informacji dotyczących stosowania opatrunku Aquacel Ag Extra u kobiet w ciąży.
- jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku.
- brak informacji dotyczących stosowania opatrunku Aquacel Ag Extra podczas karmienia piersią.

## Przechowywanie:

- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.