

## Opatrunek Aquacel Ag + Extra 20cm x 30cm 1 sztuka



Cena: 128,25 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Convatec
Substancja czynna	Emplastri collagenosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Mepilex opatrunek piankowy - 1 sztuka

Rozmiar: 17,5 x 17,5cm

### Opis produktu:

- **Mepilex** to chłonny opatrunek piankowy do leczenia ran przewlekłych i ostrych. Produkt łatwo dopasowuje się do ciała i jest wyjątkowo chłonny, aby skutecznie radzić sobie z wysiękami z ran.

### Właściwości:

- **Mepilex** jest dobrze dostosowującym się do kształtu opatrunkiem wchłaniającym wysięk, utrzymującym wilgotność w ranie i zmniejszającym ryzyko maceracji
- W opatrunku wykorzystano technologię miękkiego przylegającego silikonu która sprawia, że opatrunek delikatnie przylega do suchych powierzchni jak skóra, jednocześnie nie przylega do powierzchni wilgotnych czyli ran otwartych. Dzięki temu zmniejsza ból u pacjentów i minimalizuje uraz rany

- Opatrunek bardzo dobrze dopasowuje się do ciała, w razie potrzeby można go dociąć, dostosowując do różnych kształtów rany

## Zastosowanie:

Opatrunek Mepilex można stosować w połączeniu z:

- kompresjoterapią
- opatrunkami żelowymi

Opatrunki Mepilex mogą być stosowane w celu:

- leczenia ran z wysiękiem (owrzodzenia kończyn dolnych i stóp, odleżyny, rany pourazowe takie jak rozdarcia skóry i rany gojące się wtórnie)
- zapobiegania powstawaniu uszkodzeń skóry, w tym odleżyn
- ochrony wrażliwej lub zagrożonej skóry

## Sposób aplikacji:

- Przed nałożeniem opatrunku należy dokładnie oczyścić ranę oraz osuszyć skórę.
- Opatrunek powinien w pełni pokrywać ranę oraz dodatkowo zachodzić 2 cm na skórę dookoła rany. Jeśli to konieczne można go zabezpieczyć bandażem
- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie

## Przeciwwskazania:

- tego opatrunku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości pacjenta na którykolwiek z jego składników
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta

## Środki ostrożności:

- w przypadku wystąpienia objawów infekcji (gorączka, zaczerwienienie, obrzęk rany lub otaczającej ją skóry, zwiększona ciepłota ciała) należy skontaktować się z fachowym personelem medycznym w celu leczenia zakażenia
- pianka poliuretanowa w opatrunku może pod wpływem światła, powietrza lub temperatury zmienić kolor na bardziej żółty, co nie wpływa na zmianę właściwości opatrunku
- opatrunek jednorazowego użytku - nie należy go używać ani sterylizować ponownie
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta.

## Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.