

Opatrunek kontaktowy Lomatuell Pro 10x10cm 1 sztuka



Cena: 9,16 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Lohmann & Rausher
Substancja czynna	Emplastri hydrocolloidosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Lomatuell Pro, opatrunek siatkowy z żelującą warstwą kontaktową - 1 sztuka

Rozmiar: 10x10 cm

Opis produktu:

Lomatuell Pro to żelowy opatrunek kontaktowy o strukturze otwartej siateczki

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

Skład:

- Siatka tiulowa z włókien poliestrowych zaimpregnowana masą powłoki składającą się z matrycy polimerowej (masa mocująca dająca się elastycznie kształtować)
- wazelina
- hydrokolid

Właściwości:

- łatwe zastosowanie
- można stosować po obu stronach
- można przyciąć do różnych wielkości ran i obszarów ciała
- wspomaga gojenie się ran
- minimalizacja ryzyka sklejenia się z raną
- elastyczny, przylegający materiał
- dobre odprowadzanie wysięku do opatrunku wtórnego
- bezurazowa i niemal bezbolesna zmiana opatrunku

Zastosowanie:

- można stosować we wszystkich fazach wysięku
- rany przewlekłe
- owrzodzenia podudzi
- owrzodzenia stopy cukrzycowej
- odleżyny
- rany ostre
- rany szarpane, cięte i otarcia
- oparzenia II stopnia
- pooperacyjne rany chirurgiczne
- wtórnie gojące się rany pooperacyjne
- miejsca pobrania skóry do przeszczepu
- można łączyć z leczeniem podciśnieniem jako siateczkę oddzielającą ranę

Sposób aplikacji:

- przed nałożeniem opatrunku należy oczyścić obszar rany za pomocą odpowiedniego środka oczyszczającego oraz osuszyć skórę wokół rany jałowymi kompresami
- opatrunek można stosować po obu stronach
- opatrunek należy dobrać tak, aby przykrył całą powierzchnię rany i skórę wokół niej
- opatrunek można przycinać

Zalecana częstość zmiany opatrunku wynosi co 2 do 4 dni. W zależności od rodzaju oraz postępów gojenia się rany, opatrunek można pozostawić na ranie dłużej (maks. do 7 dni) lub krócej.

Uwaga:

- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.