

Opatrunek, Mepilex, 17,5cmx17,5cm, opatrunek, piankowy, 1 sztuka



Cena: 41,68 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	MOLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Emplastru microfibrilum cellulosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Mepilex opatrunek piankowy - 1 sztuka

Rozmiar: 17,5 x 17,5cm

Opis produktu:

- **Mepilex** to chłonny opatrunek piankowy do leczenia ran przewlekłych i ostrych. Produkt łatwo dopasowuje się do ciała i jest wyjątkowo chłonny, aby skutecznie radzić sobie z wysiękami z ran.

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

Właściwości:

- **Mepilex** jest dobrze dostosowującym się do kształtu opatrunkiem wchłaniającym wysięk, utrzymującym wilgotność w ranie i zmniejszającym ryzyko maceracji

- W opatrunku wykorzystano technologię miękkiego przylegającego silikonu która sprawia, że opatrunek delikatnie przylega do suchych powierzchni jak skóra, jednocześnie nie przylega do powierzchni wilgotnych czyli ran otwartych. Dzięki temu zmniejsza ból u pacjentów i minimalizuje uraz rany
- Opatrunek bardzo dobrze dopasowuje się do ciała, w razie potrzeby można go dociąć, dostosowując do różnych kształtów rany

Zastosowanie:

Opatrunek Mepilex można stosować w połączeniu z:

- kompresjoterapią
- opatrunkami żelowymi

Opatrunki Mepilex mogą być stosowane w celu:

- leczenia ran z wysiękiem (owrzodzenia kończyn dolnych i stóp, odleżyny, rany pourazowe takie jak rozdarcia skóry i rany gojące się wtórnie)
- zapobiegania powstawaniu uszkodzeń skóry, w tym odleżyn
- ochrony wrażliwej lub zagrożonej skóry

Sposób aplikacji:

- Przed nałożeniem opatrunku należy dokładnie oczyścić ranę oraz osuszyć skórę.
- Opatrunek powinien w pełni pokrywać ranę oraz dodatkowo zachodzić 2 cm na skórę dookoła rany. Jeśli to konieczne można go zabezpieczyć bandażem
- **Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie**

Przeciwwskazania:

- tego opatrunku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości pacjenta na którykolwiek z jego składników
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta

Środki ostrożności:

- w przypadku wystąpienia objawów infekcji (gorączka, zaczerwienienie, obrzęk rany lub otaczającej ją skóry, zwiększona ciepłota ciała) należy skontaktować się z fachowym personelem medycznym w celu leczenia zakażenia
- pianka poliuretanowa w opatrunku może pod wpływem światła, powietrza lub temperatury zmienić kolor na bardziej żółty, co nie wpływa na zmianę właściwości opatrunku
- opatrunek jednorazowego użytku - nie należy go używać ani sterylizować ponownie
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku

Uwaga:

- Opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- Opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE 2797**
- Posiada deklarację **zgodności UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta