

Opatrunek, Mepilex AG, 12,5cmx12,5cm, 1 szt



Cena: 26,39 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	MOLNLYCKE HEALTH CARE POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Emplastru antimicrobiotica
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Mepilex Ag opatrunek ze srebrem - 1 sztuka

Rozmiar: 12,5 x 12,5 cm

Opis produktu:

- **Mepilex Ag** to miękki opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, zawierający **siarczan srebra i węgiel aktywowany**, który chłonie wysięk, utrzymuje wilgotne środowisko rany i działa przeciwbakteryjnie
- **Mepilex Ag** zawierający cząsteczki srebra wykazuje zdolność inaktywowania bakterii w ranie dzięki czemu zmniejsza jej zanieczyszczenie biologicznie. W przypadku ryzyka infekcji wyrób działa niczym bariera przeciwbakteryjna chroniąc uszkodzoną tkankę. Silikonowa warstwa kontaktowa na spodzie opatrunku sprawia, że delikatnie przylega do skóry, co zmniejsza ból u pacjenta podczas zmiany opatrunku.
- Produkt zwiększa tempo gojenia się oparzeń niepełnej grubości skóry

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

Właściwości:

- wchłanianie wysięku
- utrzymywanie wilgotnego środowiska rany
- przeciwbakteryjne

Zastosowanie:

- rany zakażone o małym i średnim wysięku, o różnej etiologii
- owrzodzenia na tle niewydolności żyłnej
- stopa cukrzycowa
- odleżyny
- oparzenia II-go stopnia
- powikłane rany pooperacyjne

Sposób aplikacji:

Opatrunek specjalistyczny należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Opatrunek **Mepilex Ag** może być stosowany przez osoby leżące pod nadzorem personelu medycznego.

Rozmiar opatrunku należy dobrać tak, by powierzchnia wyspy opatrunkowej była większa od powierzchni rany o około:

- 1 - 2 cm w przypadku ran mniejszych
- 3 - 5 cm w przypadku ran większych

Opatrunek Mepilex Ag można dowolnie przycinać.

Zakładanie opatrunku:

- oczyścić ranę
- osuszyć skórę otaczającą ranę
- usunąć środkową folię ochronną i przykleić opatrunek na ranę
- usunąć pozostałą folię i nie rozciągając opatrunku wygładzić jego brzegi na skórze
- opatrunek Mepilex Ag zabezpieczyć w razie potrzeby na przykład za pomocą bandaża

W zależności od stanu rany i otaczającej je skóry opatrunek Mepilex może pozostawać na ranie **maksymalnie przez 7 dni**. Należy go zmienić, zanim w pełni nasiąknie wydzieliną lub widoczne są ślady wycieku.

Leczenie opatrunkiem Mepilex Ag nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie

Przeciwwskazania:

- tego opatrunku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości pacjenta na którykolwiek z jego składników
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta

Środki ostrożności:

- opatrunku nie należy przecinać
- opatrunek jest jednorazowego użytku

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku

Ważne:

- Opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- Opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie
- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Ważne:

- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE 2797.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.