

Opatrunek, Mepilex border, Ag 17,5x17,5cm 1 sztuka



Cena: 67,55 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Molnlycke Health Care
Substancja czynna	Emplastru collagenosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Mepilex Border Ag opatrunek ze srebrem - 1 sztuka

Rozmiar: 17,5 x 17,5cm

Opis produktu:

- Antybakteryjny opatrunek piankowy typu wszystko-w-jednym do ran ze średnim i dużym wysiękiem

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

Właściwości:

- Opatrunek piankowy typu wszystko-w-jednym ze srebrem **Mepilex Border Ag** zapewnia szybkie i długotrwałe działanie antybakteryjne, aby zmniejszyć zanieczyszczenie biologiczne rany
- Budowa opatrunku **Mepilex Border Ag** obejmuje oryginalną, zmniejszającą ból warstwę kontaktową z miękkiego silikonu Safetac. Warstwa ta pozwala zmniejszyć ból odczuwany przez pacjentów podczas zmian opatrunków

- szybkie i długotrwałe działanie przeciwbakteryjne
- zatrzymuje duże ilości wysięku aby skutecznie zarządzać wilgotnym środowiskiem rany

Zastosowanie:

Wielozadaniowa konstrukcja umożliwia stosowanie go na:

- rany przewlekłe oraz ostre ze średnim i dużym wysiękiem
- owrzodzenia kończyn dolnych i stóp
- odleżyny
- rany nowotworowe
- oparzenia niepełnej grubości skóry oraz rany urazowe i pooperacyjne

Sposób aplikacji:

- Należy dokładnie oczyścić ranę przed aplikacją opatrunku
- Zakładając opatrunek należy upewnić się, że został zachowany co najmniej dwucentymetrowy margines na skórze zdrowej otaczającej łożysko rany
- Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie.

Przeciwwskazania:

- uczulenie na srebro lub którykolwiek ze składników opatrunku
- radioterapia lub badania z wykorzystaniem promieniowania, jak RTG, ultrasonografia, diatermia, obrazowanie MR
- łączenie ze środkami utleniającymi, jak np. roztwory podchlorynów lub nadtlenku wodoru

Środki ostrożności:

- należy unikać zetknięcia z elektrodami lub żelami przewodzącymi podczas pomiarów elektronicznych np. EKG, EEG
- Opatrunek Mepilex Border Ag może powodować przejściowe przebarwienie dna rany i otaczającej skóry.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławić ponownie.
- wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.