

## Opatrunek, mepilex, rany, odleżyny 12,5cmx12,5cm 1 sztuka



Cena: 22,90 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Molnlycke Health
Substancja czynna	Emplastri microfibricum cellulosae
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Mepilex opatrunek piankowy - 1 sztuka

Rozmiar: 12,5 x 12,5cm

### Opis produktu:

- **Mepilex** to chłonny opatrunek piankowy do leczenia ran przewlekłych i ostrych. Produkt łatwo dopasowuje się do ciała i jest wyjątkowo chłonny, aby skutecznie radzić sobie z wysiękami z ran.

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

### Właściwości:

- **Mepilex** jest dobrze dostosowującym się do kształtu opatrunkiem wchłaniającym wysięk, utrzymującym wilgotność w ranie i zmniejszającym ryzyko maceracji
- W opatrunku wykorzystano technologię miękkiego przylegającego silikonu która sprawia, że opatrunek delikatnie przylega do suchych powierzchni jak skóra, jednocześnie nie przylega do powierzchni wilgotnych czyli ran otwartych. Dzięki temu zmniejsza ból u pacjentów i minimalizuje uraz rany

- Opatrunek bardzo dobrze dopasowuje się do ciała, w razie potrzeby można go dociąć, dostosowując do różnych kształtów rany

## Zastosowanie:

Opatrunek Mepilex można stosować w połączeniu z:

- kompresjoterapią
- opatrunkami żelowymi

Opatrunki Mepilex mogą być stosowane w celu:

- leczenia ran z wysiękiem (owrzodzenia kończyn dolnych i stóp, odleżyny, rany pourazowe takie jak rozdarcia skóry i rany gojące się wtórnie)
- zapobiegania powstawaniu uszkodzeń skóry, w tym odleżyn
- ochrony wrażliwej lub zagrożonej skóry

## Sposób aplikacji:

- przed nałożeniem opatrunku należy dokładnie oczyścić ranę oraz osuszyć skórę.
- opatrunek powinien w pełni pokrywać ranę oraz dodatkowo zachodzić 2 cm na skórę dookoła rany. Jeśli to konieczne można go zabezpieczyć bandażem
- produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie

## Przeciwwskazania:

- tego opatrunku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości pacjenta na którykolwiek z jego składników
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta

## Środki ostrożności:

- w przypadku wystąpienia objawów infekcji (gorączka, zaczerwienienie, obrzęk rany lub otaczającej ją skóry, zwiększona ciepłota ciała) należy skontaktować się z fachowym personelem medycznym w celu leczenia zakażenia
- pianka poliuretanowa w opatrunku może pod wpływem światła, powietrza lub temperatury zmienić kolor na bardziej żółty, co nie wpływa na zmianę właściwości opatrunku
- opatrunek jednorazowego użytku - nie należy go używać ani sterylizować ponownie
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta.

## Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub

farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku

## Ważne:

- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

## Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławiać ponownie.
- wyłącznie do użytku zewnętrznego.

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.