

## Opatrunek, UrgoTul, 20 cm x 30 cm, rany, owrzodzenia, odleżyny 1 sztuka



Cena: 72,06 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	URGO SP.Z O.O.
Substancja czynna	Emplastri microfibricum cellulosae
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### UrgoTul, Contact elastyczny lipidowo-koloidowy opatrunek kontaktowy - 1 sztuka

Rozmiar: 20x30 cm

### Opis produktu:

- Opatrunek UrgoTul wykonano z zastosowaniem technologii lipidowo-koloidowej (TLC) opracowanej wyłącznie przez firmę Urgo
- Opatrunek UrgoTul to nieokluzyjny, elastyczny i podatny opatrunek zawierający **siateczkę poliestrową** impregnowaną cząstkami hydrokoloidu dyspergowanymi w matrycy z **wazeliną**
- Masa ta zawiera hydrokoloid (karboksymetylocelulozę), olej parafinowy, wazelinę i polimery nośnikowe

### Właściwości:

- stwarza i utrzymuje wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu rany
- jego usunięcie nie prowadzi do uszkodzenia nowo powstałej tkanki

- zmiana opatrunku jest bezbolesna

## Zastosowanie:

Elastyczny i bardzo wygodny opatrunek **UrgoTul** jest szczególnie odpowiedni do stosowania na trudne do pokrycia lub nietypowo położone rany oraz do leczenia ran głębokich

Opatrunek **UrgoTul** jest wskazany do leczenia:

- ran ostrych (oparzeń, ran pourazowych, otarć, ran pooperacyjnych)
- ran przewlekłych (owrzodzeń kończyn dolnych, odleżyn i owrzodzeń stopy cukrzycowej) w stadium ziarninowania i epitelializacji
- pęcherzowego złuszczenia naskórka (EB)

## Sposób aplikacji:

- przygotować ranę zgodnie z lokalną praktyką. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, dobrze przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul
- zdjąć ochronną, przezroczystą, cienką folię
- nałożyć opatrunek UrgoTul na ranę w pojedynczej warstwie
- opatrunek UrgoTul można przyciąć jałowymi nożyczkami, dostosowując wielkość opatrunku do wielkości rany i otaczającej skóry
- przykryć opatrunek UrgoTul drugim opatrunkiem, odpowiednim do pochłonięcia wysięku z rany
- zabezpieczyć drugi opatrunek bandażem, przylepcem lub opaską elastyczną
- opatrunek UrgoTul należy zmieniać co 2 do 4 dni w zależności od typu rany i jej stanu klinicznego
- opatrunek UrgoTul można pozostawić na ranie maksymalnie 7 dni w zależności od stanu rany
- u pacjentów z pęcherzowym złuszczeniem naskórka opatrunek należy zmieniać co 1 do 3 dni

## Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- potwierdzona nadwrażliwość na opatrunek
- opatrunek UrgoTul przykleja się do lateksowych rękawic chirurgicznych. Dlatego zaleca się zwilżenie rękawic chirurgicznych solą fizjologiczną, aby ułatwić posługiwanie się opatrunkiem UrgoTul
- w razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny, w zależności od oceny klinicznej. W przypadku ran głębokich i ran przetoki należy pozostawić widoczną część opatrunku, co umożliwi jego usunięcie
- opatrunku UrgoTul nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- sterylne opakowanie pojedyncze do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia. Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylne opakowanie ochronne nie zostało uszkodzone
- nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania

- nie sterylizować powtórnie opatrunku

## Uwaga:

- Produkt jednorazowy, nie stosować ponownie
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Posiada oznakowanie CE 0459
- Zawiera instrukcje w języku polskim
- Zawiera oznakowania, etykiety w języku polskim
- Posiada deklarację zgodności UE

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0459
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.