

Opatrunek, UrgoTul, Absorb Border, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka odleżyny, rany



Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	URGO SP.Z O.O.
Substancja czynna	Emplastru microfibrillum cellulosa
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

UrgoTul, Absorb Border samoprzylepny opatrunek piankowy z matrycą gojącą - 1 sztuka

Rozmiar: 10x10 cm

Opis produktu:

- zapewnia wszystkie korzyści TLC i silikonowych, samoprzylepnych brzegów (wilgotne środowisko, optymalne wyniki gojenia, bezbolesne i bezurazowe zdejmowanie)
- **TLC (Technologia lipidowo-koloidowa)** to opatentowana, innowacyjna technologia obejmująca unikatowe skojarzenie polimerów i cząsteczek hydrokoloidu, zapewniająca bezbolesne i bezurazowe zdejmowanie opatrunku u pacjentów, przy jednoczesnym pobudzaniu gojenia. Po zetknięciu z wysiękiem rany, cząstki te tworzą żel i stwarzają wilgotne środowisko, korzystne dla procesu gojenia, co umożliwia prawidłowe działanie kluczowych komórek uczestniczących w procesie naprawy (fibroblastów, keratynocytów, makrofagów)
- zapewnia optymalne wyniki gojenia
- chłonna wkładka z pianki poliuretanowej oraz silnie chłonna warstwa opatrunku UrgoTul Absorb Border odpowiadają za pochłanianie nadmiaru płynu, zapobiegając maceracji
- nieprzepuszczalne dla wody podłoże opatrunku UrgoTul Absorb Border jest miękkie, bardzo wygodne i nieokluzyjne, co

umożliwia dobre dopasowanie opatrunku do ran o różnych kształtach oraz zapobiega przedostawaniu się płynu i bakterii przez opatrunek.

- wysoka przepuszczalność dla gazów zapobiega maceracji tkanek, prowadząc do usunięcia nadmiaru wysięku
- opatrunek także rozciąga się w trakcie ruchów pacjenta, zapewniając wygodę
- samoprzylepny brzeg sprawia, że zbędne jest dodatkowe zabezpieczenie opatrunku
- opatrunek jest przezroczysty, dzięki czemu można kontrolować ilość płynu w ranie, co pozwala na zmianę opatrunku jedynie w razie potrzeby

Właściwości:

- zapewnia optymalne efekty gojenia
- pochłaniania wysięk i drenaż rany, zapobiega maceracji
- utrzymuje wilgotne środowisko korzystne dla procesu gojenia rany
- bezurazowe i bezbolesne zdejmowanie
- nieprzepuszczalny dla wody, silikonowy, samoprzylepny brzeg
- bardzo wygodny, łatwa zmiana umiejscowienia opatrunku
- opatrunek nadaje się do stosowania pod bandaż uciskowy, jeśli takie postępowanie zostało zlecone.

Zastosowanie:

- rany ostre z wysiękiem
- rany ostre, oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany pooperacyjne
- rany przewlekłe, odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej

Sposób aplikacji:

Zmiana opatrunku

- ucisnąć zdrową skórę, unieść róg opatrunku i ostrożnie go odkleić

Zdejmowanie opatrunku

- zdjąć ochronne skrzydełka
- nałożyć na ranę miękką, przylegającą stroną opatrunku UrgoTul Absorb Border (samoprzylepny brzeg silikonowy powinien znajdować się co najmniej 1 cm od rany)
- wygładzić opatrunek na ranie
- zabandażować opatrunek bandażem uciskowym, o ile zostało to zalecone

Nakładanie odmiany krzyżowej opatrunku

- umieścić opatrunek tak, aby jego koniec był skierowany w stronę obszaru krzyżowego

Nakładanie opatrunku

- oczyścić ranę zgodnie z miejscowym protokołem
- jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Absorb Border
- ostrożnie osuszyć otaczającą skórę

Opatrunek UrgoTul Absorb Border można zmieniać co 2 do 4 dni, ale nie rzadziej niż co 7 dni w zależności od ilości wysięku i stanu rany

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu
- nie należy przecinać środkowej części opatrunku, która zawiera silnie chłonną warstwę. Natomiast w razie potrzeby można przyciąć samoprzylepne brzegi nożyczkami, tak aby opatrunek pasował do kształtu rany
- w razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia, można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny Urgo, w zależności od oceny klinicznej
- należy usunąć nadmierne owłosienie, obcinając włosy blisko skóry, aby zapewnić dobry kontakt opatrunku ze skórą
- w przypadku równoczesnego stosowania opatrunku z kremem, emulsją, należy pozwolić na wyschnięcie skóry przed zastosowaniem opatrunku
- opatrunku UrgoTul Absorb Border nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej
- sterylne opakowanie jednostkowe do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia
- przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania
- nie sterylizować powtórnie opatrunku

Ważne:

- Produkt jednorazowy, nie stosować ponownie
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Podmiot odpowiedzialny:

URGO LABORATOIRES 42 rue de Longvic, Francja Chenove

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

