

Opatrunek UrgoTul Ag/Silver 15 cm x 20 cm 1 sztuka



Cena: 62,43 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	Emplastry antimicrobiotica
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

UrgoTul Ag opatrunek ze srebrem - 1 sztuka

Rozmiar: 15 x 20 cm

Opis produktu:

- Opatrunek UrgoTul Ag/Silver to opatrunek impregnowany solami srebra, otrzymany z użyciem technologii lipidowo-koloidowej (TLC). Opatrunek zawiera matrycę gojącą ze srebrem, wykonaną z siateczki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami hydrokoloidu (karboksymetylocelulozy), wazeliny, polimerów kohezyjnych i soli srebra. UrgoTul Ag/Silver nie jest opatrunek samoprzylepnym i okluzyjnym
- Nie przywiera do rany

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością

Skład:

- matryca gojąca ze srebrem, wykonana z siateczki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami hydrokoloidu (karboksymetylocelulozy)

- wazelina
- polimery kohezyjne
- sole srebra

Właściwości:

- przeciwbakteryjne
- utrzymuje wilgotne środowisko, sprzyjające gojeniu rany
- tworzy żel po zetknięciu się z raną
- zdjęcie opatrunku nie prowadzi do uszkodzenia nowopowstałej tkanki
- bezbolesna zmiana opatrunku
- ochrona otaczającej skóry
- jony Ag+ matrycy gojącej ze srebrem (TLC-Ag) nadają opatrunkowi UrgoTul Ag/Silver działanie przeciwbakteryjne, które może zmniejszać miejscową ilość bakterii
- srebro ma działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum, obejmujące bakterie Gram ujemne i Gram dodatnie oraz niektóre pleśnie i drożdże. Jest szczególnie skuteczne wobec *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* i *Pseudomonas aeruginosa* (pałeczka ropy błękitnej), które są najczęściej odpowiedzialne za zakażenia ran
- opatrunek wykazuje działanie przeciwbakteryjne przez okres do 7 dni.
- działanie przeciwbakteryjne opatrunku także przyczynia się do zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu

Zastosowanie:

- miejscowe leczenie ran z miejscowym zapaleniem lub zagrożonych miejscowym zapaleniem
- rany przewlekłe (odleżyny i owrzodzenia kończyn dolnych)
- rany ostre (oparzenia o częściowej grubości, otarcia skóry, rany pourazowe, rany chirurgiczne itp.)
- Ze względu na brak właściwości samoprzylepnych, opatrunek UrgoTul Ag/Silver jest zalecany w leczeniu ran, w których otaczająca skóra jest osłabiona

Sposób aplikacji:

- oczyścić ranę roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, dokładnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Ag/Silver
- w razie potrzeby, opatrunek UrgoTul Ag/Silver można przyciąć jałowymi nożyczkami, dostosowując wielkość opatrunku do wielkości rany
- zdjąć z opatrunku ochronne skrzydełka
- nałożyć opatrunek UrgoTul Ag/Silver bezpośrednio na ranę

- przykryć opatrunek UrgoTul Ag/Silver drugim opatrunkiem (sterylną wkładką odpowiednią do pochłaniania wysięku, zabezpieczoną bandażem)
- w razie potrzeby założyć bandaż uciskowy
- opatrunek UrgoTul Ag/Silver można zmieniać co 1 do 3 dni w zależności od leczonej rany i przebiegu gojenia
- czas trwania kuracji UrgoTul Ag/Silver nie powinien przekroczyć jednego miesiąca

Produkt jednorazowego użytku, nie stosować ponownie

Przeciwwskazania:

- tego opatrunku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości pacjenta na którykolwiek z jego składników
- lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania tego opatrunku u pacjenta

Środki ostrożności:

- unikać kontaktu z elektrodami i żelami przewodzącymi w trakcie pomiarów elektronicznych, np. EEG i EKG.
- nie stosować w komorze hiperbarycznej.
- opatrunek jednorazowy, dla jednego pacjenta, sterylny: powtórne użycie opatrunku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- nie sterylizować powtórnie opatrunku.
- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na srebro i inne składniki opatrunku.
- nie stosować u pacjentów poddawanych obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem specjalistycznego opatrunku

Ważne:

- opatrunek należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poniżej 25oC
- opatrunek należy przechowywać w suchym miejscu

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławić ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 2797
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.