

Opti-Free Express Multi-purpose 355 ml



Cena: 39,40 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Alcon
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

OptiFree Express wielofunkcyjny płyn do soczewek - 355 ml

Dobra praktyka pielęgnacji soczewek

Opis produktu:

Alcon Opti-Free Express płyn do soczewek to wyrób medyczny, który czyści i dezynfekuje soczewki, działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Nawilża soczewkę i pozostawia ją w świeżości przez wiele godzin, zapobiega gromadzeniu się osadów białkowych.

- Wyrób przeznaczony dla wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, również silikonowo-hydrożelowe

Skład:

Jałowy, zbuforowany izotoniczny wodny roztwór zawierający chlorek sodu, sorbitol, wersenian disodowy, kwas borny, aminometylopropanol, cytrynian sodu, Tetricon 1304, Polyquad (polikwaternium-1) 0,001%, Aldox (mirstamidopropylodimetyloamina) 0.0005%

Wskazania:

Do wszystkich miękkich soczewek kontaktowych, również silikonowo-hydrożelowych

Działanie:

Produkt usuwa osady białkowe, działa bakteriobójczo oraz grzybobójczo, niszczy Acanthamoeba sp. Utrzymuje soczewki czyste i wygodne w użyciu

Sposób użycia:

- Dokładnie umyj i wytrzyj ręce
- Płynem Opti-Free Express dokładnie zmocz każdą stronę soczewki
- Potrzymaj każdą ze stron soczewki przez około 10 sekund, po czym dokładnie je opłukaj ciągłym strumieniem płynu Opti-Free Replenish
- Napełnij świeżym płynem Opti-Free Express pojemnik na soczewki
- Soczewki przechowuj w zamkniętym pojemniku na soczewki przez noc lub co najmniej przez 6 godzin
- W przypadku gdy na soczewkach kontaktowych pozostały jakies zanieczyszczenia, należy je opłukać płynem Opti-Free Express przed ich nałożeniem
- Soczewki mogą być przechowywane w nieotwieranym pojemniku z płynem do 30 dni

Przeciwwskazania:

- Jeżeli w trakcie noszenia soczewek kontaktowych wystąpi łagodne podrażnienie, dyskomfort lub niewyraźne widzenie, należy podać 1 lub 2 krople Opti-Free Express do oka, a następnie dwu-trzykrotnie mrugnąć okiem
- Płyn można stosować tak często jak wymaga tego potrzeba
- Zawsze należy stosować się do zaleceń okulisty oraz ulotek informacyjnych dołączonych do środków pielęgnacyjnych, jak również soczewek i pojemników. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu, nadmiernego łzawienia, zmian w widzeniu, zaczerwienieniu oka, należy natychmiastowo zdjąć soczewkę i skontaktować się z okulistą
- Zawsze należy używać świeżego płynu Opti-Free Express. Nigdy nie należy używać go ponownie do pojemników na soczewki
- Należy używać wyłącznie pojemników na soczewki Alcon
- W celu uniknięcia zainfekowania płynu nie należy dotykać końcówką butelki do żadnych powierzchni

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej
- Nie stosować do dezynfekcji cieplnej (termicznej)
- Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia opakowania
- Nie stosować po upływie terminu ważności

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.