

Optilets Lancety 28G, 100 sztuk



Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Diagnosis
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Optilets Jednorazowe Sterylne Lancety 28G - Opakowanie (100 Sztuk)

DO UŻYTKU Z NAKŁUWACZEM OPTILET MINI

Do nakłuwania skóry w celu pobrania próbki krwi kapilarnej, do samodzielnego oznaczania poziomu glukozy we krwi.

Sposób użycia:

1. Umyj dokładnie ręce ciepłą wodą i mydłem, a następnie dokładnie je osusz czystym ręcznikiem.
2. Wybierz miejsce nakłucia. Najczęściej nakłuwana jest boczna część opuszki palca.
3. Usuń nasadkę zabezpieczającą z lancetu.
4. Wprowadź lancet do nakłuwacza Optilets i wykonaj nakłucie.
5. Wykonaj pomiar stężenia glukozy zgodnie z instrukcją, następnie oczyść miejsce nakłucia.
6. Załóż ponownie nasadkę zabezpieczającą na ostrze lancetu i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE 0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie należy ponownie używać lancetu.
- Nie należy pożyczać lancetu ani nakłuwacza innym osobom. Stwarza to niebezpieczeństwo przeniesienia infekcji.
- Nie używać jeśli nasadka jest uszkodzona.
- Nie przechowywać lancetu w nakłuwaczu.

Producent:

DIAGNOSIS S.A., Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok.