

Otovent zestaw do wyrównania ciśnienia w uchu 1 zestaw



Cena: 61,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	AXPHARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Otovent, zestaw, 1 sztuka

Leczenie ujemnego ciśnienia w uchu środkowym

Działanie:

- pomaga uniknąć chirurgicznego zabiegu zakładania rurek wentylacyjnych w błonie bębenkowej ucha pacjenta.
- zasada działania polega na tym, że dziecko napełnia balon medyczny powietrzem wdmuchiwanym przez nos. Wyrównuje w ten sposób ciśnienie i łagodzi objawy ze strony uchu środkowym.
- dzieci mogą używać zestawu Otovent w domu pod nadzorem rodziców.

Sposób użycia:

- podłączyć balon do końcówki nosowej.
- prawą ręką mocno docisnąć okrągłą część końcówki nosowej do prawego otworu nosowego.
- palcami lewej ręki zatkać lewy przewód nosowy.
- przycisnąć skrzydełko nosa z lewej strony w taki sposób by szczelnie zatkać lewy przewód nosowy.
- głęboko wciągnąć powietrze i zamknąć usta.

- nadmuchać balon prawym otworem nosowym, aż osiągnie rozmiar grejpfruta.
- powtórzyć procedurę dla lewego otworu nosowego.
- leczenie jest skuteczne, gdy dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu
- Otovent należy stosować 2-3 razy dziennie, aż do całkowitego usunięcia płynu wysiękowego z ucha środkowego.
- może być używany przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 3 roku życia.

Środki ostrożności:

- każdy balon można napełniać maksymalnie 20 razy. (wtedy ciśnienie do przedmuchiwania trąbek słuchowych jest skuteczne)

Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu
- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

Zawartość: 1 zestaw

Producent:

Axfarm sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 73/26 85-667 Bydgoszcz