

## Płyn do soczewek, Zero-Seven Refreshing, 120 ml



Cena: 18,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Horien Medical
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Płyn do soczewek, Zero-Seven Refreshing, 120 ml

### Wskazania:

Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych Zero-Seven Refreshing to rozwiązanie do **kompleksowej higieny wszystkich miękkich soczewek**, w tym silikonowo-hydrożelowych. Przeznaczony zarówno do soczewek korekcyjnych, jak i kosmetycznych, **skutecznie usuwa zanieczyszczenia, osady i białka**.

### Właściwości:

Formuła wzbogacona o hialuronian sodu **zapewnia długotrwałe nawilżenie, uczucie świeżości i komfortu** noszenia soczewek przez cały dzień. Dzięki technologii No-Rub, **płyn umożliwia czyszczenie i dezynfekcję bez konieczności pocierania**. Można go także stosować do przechowywania soczewek, a opakowanie zawiera specjalny pojemnik do ich przechowywania.

Płyn Zero-Seven Refreshing służy do:

- czyszczenia,
- dezynfekcji,

- płukania,
- przechowywania,
- usuwania osadów białkowych,
- nawilżania soczewek.

## Sposób użycia:

- przed dotknięciem soczewek umyj i osusz ręce,
- wyjmij soczewkę i umieść na dłoni,
- nanieś 3 krople płynu na obie strony soczewki,
- delikatnie pocieraj ją przez 10 sekund z każdej strony,
- dokładnie spłucz,
- umieść soczewkę w pojemniku wypełnionym płynem,
- szczelnie zamknij pojemnik,
- pozostaw soczewki na minimum 4 godziny,
- powtórz procedurę z drugą soczewką.

## Skład:

Sodium Chloride, Potassium Chloride, Disodium Edetate, Polyhexanide, Poloxamer, Sodium Hyaluronate, HPMC and Sodium Phosphate Buffer.

## Cechy Produktu:

- Zawiera hialuronian sodu, intensywnie nawilżający soczewki dla całoniedzielnego komfortu.
- Kompatybilny z wszystkimi rodzajami miękkich soczewek kontaktowych, w tym silikonowo-hydrożelowymi i kolorowymi.
- Bezpieczny do codziennego stosowania, chroni przed bakteriami i zanieczyszczeniami.
- Formuła No-Rub eliminuje potrzebę pocierania, co oszczędza czas i chroni soczewki przed uszkodzeniami.

## Uwagi:

- Zużyj w ciągu 3 miesięcy od otwarcia.
- Nie stosuj w przypadku utraty sterylności lub uszkodzonego opakowania.
- Nie sterylizuj ponownie.

- Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

## Przechowywanie:

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy dokładnie przeczytać instrukcję używania.

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 2460
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Producent:

Stericon Pharma PVT. LTD. 9R, Sub Layout of Plot 9, 1 Phase, Bommasandra Industrial Area, Bangalore 560099, Indie

## Dystrybutor:

Horien Medical Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 4 86-050 Solec Kujawski