

Pre-test, domowy test ciążowy płytkowy, 1+1 sztuk



Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	RADA SP. Z O.O. SP.J.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Pre-test, domowy test ciążowy płytkowy, 1+1 sztuk

- PRE-TEST to łatwy i szybki w użyciu test ciążowy o wysokiej czułości, do wykonania w domu.
- Wiarygodność wskazania odpowiada testowi laboratoryjnemu i wynosi ponad 99%.
- Zanim wykonasz test, przeczytaj dokładnie ulotkę.

Właściwości:

- PRE-TEST jest testem diagnostycznym in-vitro.
- Umożliwia określenie obecności w moczu hormonu hCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa), wytwarzanego wkrótce po zapłodnieniu przez komórki trofoblastyczne rozwijającego się łożyska
- Test najlepiej wykonać w pierwszym dniu, w którym nie wystąpiła spodziewana miesiączka, lub w kolejnych dniach.

Zawartość opakowania:

- Ulotka informacyjna - 1 sztuka
- Test oraz pipeta w szczelnej saszetce z folii aluminiowej - 2 kpl.
- Pojemnik na mocz - 2 sztuki

Wewnątrz saszetki z folii aluminiowej znajduje się również pochłaniacz wilgoci, który należy wyrzucić.

Sposób użycia:

- Przeczytaj dokładnie ulotkę przed użyciem testu.
- Przed przeprowadzeniem testu zbierz niewielką ilość moczu do załączonego pojemnika. Jeżeli mocz zawiera widoczny osad, to powinien być odstawiony do opadnięcia osadu w celu uzyskania czystej próbki do testu.
- Rozerwij folię w miejscu nacięcia i wyjmij płytkę testową oraz pipetę, a następnie połóż na czystej, płaskiej powierzchni.
- Końcówkę pipety zanurz w pojemniku, w którym znajduje się próbka moczu.
- Nabierz mocz do pipety, ściskając jej górną część.
- Trzymając pipetę pionowo, umieść 3 krople moczu w przeznaczonym do tego okienku S (rysunek powyżej).
- Po 3 minutach odczytaj wynik (w zależności od stężenia hCG wynik „Ciąża można zaobserwować już po 40 sekundach). Po upływie 10 minut nie odczytuj wyniku, ponieważ wskazania testu mogą być nieprawidłowe.

Uwaga:

Nie używać testu, jeżeli saszetka z folii aluminiowej jest rozdarta lub naruszona. Przed otwarciem saszetka z folii aluminiowej powinna mieć temperaturę pokojową. Saszetkę należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem.

Ważne informacje:

- Niniejszy test umożliwia zdiagnozowanie przypuszczalnej ciąży.
- Użytkowniczka testu nie powinna podejmować żadnych decyzji o znaczeniu medycznym bez wcześniejszego skonsultowania się ze swoim lekarzem.
- Podwyższenie poziomu hormonu hCG może być spowodowane przez pewną liczbę stanów medycznych innych niż ciąża, w tym przez choroby trofoblastyczne oraz niektóre nowotwory nie trofoblastyczne, takie jak rak piersi, rak płuc, a ponadto nowotwory jąder lub rak prostaty. W związku z powyższym obecność hormonu hCG w próbce moczu nie powinna być wykorzystywana do diagnozowania ciąży, jeśli nie wykluczono obecności wyżej wymienionych schorzeń.
- Bardzo rozcieńczone próbki moczu, cechujące się niskim ciężarem właściwym, mogą nie zawierać reprezentatywnych ilości hCG. W przypadku dalszego podejrzenia ciąży, po upływie 48 godzin należy powtórzyć test przy użyciu pierwszego porannego moczu.
- W przypadku, gdy poziom hCG jest poniżej progu czułości testu, możliwe jest uzyskanie fałszywych wyników „Brak ciąży”. W przypadku dalszego podejrzenia ciąży, po upływie 48 godzin należy powtórzyć test przy użyciu pierwszego porannego moczu.
- Wczesna ciąża może ulec naturalnemu poronieniu przed dniem spodziewanej miesiączki. Dlatego zaleca się ponowne przeprowadzenie testu w dniu spodziewanej miesiączki.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze od 2-30°C
- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Wytwórca:

NORIS Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa