

Pre-Test, Płytkowy test ciążowy, 1 sztuka



Cena: 9,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Pre-test
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

WYRÓB MEDYCZNY

Pre-test Test ciążowy płytkowy - 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

Właściwości:

- Pre-test jest testem diagnostycznym domowym, dokładność odpowiada 99 %.
- Umożliwia określenie obecności w moczu hormonu hCG (ludzka gonadotropina kosmówkowa), wytwarzanego wkrótce po zapłodnieniu przez komórki trofoblastyczne rozwijającego się łożyska.
- Test najlepiej wykonać w pierwszym dniu, w którym nie wystąpiła spodziewana miesiączka, lub w kolejnych dniach.

Sposób użycia:

1. Przed przeprowadzeniem testu zbierz niewielką ilość moczu do załączonego pojemnika. Jeżeli mocz zawiera widoczny osad, to powinien być odstawiony do opadnięcia osadu w celu uzyskania czystej próbki do testu.
2. Rozerwij folię w miejscu nacięcia i wyjmij płytkę testową oraz pipetę, a następnie połóż na czystej, płaskiej powierzchni.
3. Końcówkę pipety zanurz w pojemniku, w którym znajduje się próbka moczu.
4. Nabierz mocz do pipety, ściskając jej górną część.
5. Trzymając pipetę pionowo, umieść 3 krople moczu w przeznaczonym do tego okienku S (rysunek powyżej).

6. Po 3 minutach odczytaj wynik (w zależności od stężenia hCG wynik Ciąży można zaobserwować już po 40 sekundach). Po upływie 10 minut nie odczytuj wyniku, ponieważ wskazania testu mogą być nieprawidłowe.

Interpretacja wyniku:

- **Wynik ujemny (brak ciąży)** - Wynik jest negatywny, gdy pojawia się pasek kontrolny C, natomiast brak paska testowego T. Taki wynik w 99,9% oznacza, że najprawdopodobniej nie jesteś w ciąży.
- **Wynik dodatni (ciąża)** - Wynik jest pozytywny w momencie pojawienia się dwóch wyraźnych pasków na płytce testowej, a więc zarówno w strefie testowej T, jak i w strefie kontrolnej C. Intensywność barwy paska T lub C nie ma najmniejszego znaczenia. Taki wariant wynikowy wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że jesteś w ciąży. Aby potwierdzić ten stan, udaj się do lekarza specjalisty.
- **Wynik nieważny** - Wynik możesz uznać za nieważny, jeżeli nie pojawi się żaden pasek lub wyświetli się jedynie prążek strefy testowej T. Wówczas najlepiej jest powtórzyć badanie, używając nowego testu ciążowego zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania:

- Ulotka informacyjna.
- Test oraz pipeta w szczelnej saszetce z folii aluminiowej.
- Pojemnik na moc.

Ważne:

- W celu poprawnego przeprowadzenia badania konieczne należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.
- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.
- Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.

- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Podmiot odpowiedzialny:

Phamatech

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym