

Protefix, krem mocujący do protez zębowych, Extra mocny, 2 x 47 g



Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Queisser Pharma GmbH&
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Protefix, krem mocujący do protez zębowych, extra mocny, 2 x 47 g

Wskazania:

Krem mocujący Protefix® został zaprojektowany, aby skutecznie **wspomagać mocowanie protez zębowych**, nawet przy trudniejszych warunkach przylegania czy zwiększonej produkcji śliny. Dzięki dużej sile wiązania, **zapewnia stabilność protezy przez cały dzień** (od 8 do 12 godzin), co zwiększa komfort użytkowania.

Właściwości:

Dzięki unikalnej formule, Protefix® **działa skutecznie nawet na mokrej powierzchni**, bez konieczności osuszania protezy. **Krem jest neutralny w smaku i łatwy do usunięcia**, co gwarantuje wygodę użytkowania na co dzień. Stosowanie kremu **zmniejsza ucisk, uszczelnia protezę**, a także **zapobiega przedostawaniu się resztek jedzenia pod protezę**, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się pełnym komfortem i pewnością siebie.

Sposób użycia:

1. Nałóż niewielką ilość kremu na oczyszczoną i wilgotną lub suchą powierzchnię protezy.
2. Rozłóż krem na krótkich odcinkach, eksperymentując z ilością, aby dobrać odpowiednią dawkę.
3. Po aplikacji załóż protezę, przyciśnij i lekko przygryź, aby aktywować krem.

4. Działanie rozpoczyna się natychmiast po aplikacji.
5. Po użyciu zamknij tubę, aby zapobiec przedostaniu się do niej wody.

Skład:

Guma celulozowa (27%), sól wapniowo-sodowa kopolimeru PVM/MA (26%), ciekła parafina, wazelina, krzemionka, mentol, CI 14710, metyloparaben.

Cechy produktu:

- Dla protez pełnych i częściowych,
- Extra mocne wiązanie,
- Działa na mokro,
- Natychmiastowy efekt,
- Ochrona przed uciskiem,
- Długotrwały komfort użytkowania,
- Ekonomiczne opakowanie.

Uwagi:

- Proteza powinna być odpowiednio dopasowana przez stomatologa, a przy zauważeniu zmniejszenia siły mocowania należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku stanów zapalnych lub uszkodzeń śluzówki warto skonsultować się ze specjalistą przed zastosowaniem kremu.
- Regularna higiena jamy ustnej i protezy jest niezbędna – zalecamy użycie pasty czyszczącej i tabletek dezynfekujących Protifix®.
- Skuteczność kremu może zależeć od spożywanych posiłków, stanu śluzówki i dopasowania protezy.
- Uważaj, aby do tubki nie dostała się woda – może ona spowodować stwardnienie kremu w tubce.
- Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu można go usunąć, co nie wpływa na działanie kremu.
- Podczas prawidłowego użytkowania kremu może naturalnie dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Chronić przed dostaniem się wilgoci do tubki.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Queisser Pharma GmbH&Co KG Export Department Schleswiger Strasse 74 24941 Flensburgn

Dystrybutor:

Queisser Pharma GmbH&Co KG Export Department Schleswiger Strasse 74 24941 Flensburg