

PYRALGINA TERMO HOT Plaster 1 sztuka



Cena: 3,59 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Plaster silnie rozgrzewający Termo Hot PYRALGINA

Właściwości:

PYRALGINA TERMO HOT jest plastrem rozgrzewającym, który skutecznie i naturalnie rozluźnia głębokie partie mięśni, przynosząc ulgę w bólach pleców, ramion, krzyża szyi, ścięgien, a także w przypadku bólu reumatycznego. Przeznaczony dla osób dorosłych.

PYRALGINA TERMO HOT skutecznie działa do 14 godzin, przy czym optymalny efekt rozgrzewający jest odczuwalny do 12 godzin. W wewnętrznej warstwie plastra po aktywacji (otwarciu opakowania) zachodzi reakcja egzotermiczna (wydzielająca ciepło) na skutek powolnego utleniania sproszkowanego żelaza. Plaster nie wydzielają żadnych substancji leczniczych lub znieczulających, tylko ciepło. Plaster do jednorazowego użycia, wyłącznie do stosowania zewnętrznie go, na skórę lub bawełnianą bieliznę bezpośrednio przylegającą do ciała (szczególnie zalecane u osób o szczególnie wrażliwej skórze, starszych oraz w sytuacji, kiedy odczuwana temperatura jest za wysoka). Plaster nie przeszkadza w wykonywaniu codziennych czynności. Można na nie to swobodnie założyć ubranie i normalnie funkcjonować.

Sposób użycia:

Ostrożnie otworzyć opakowanie z plastrem (rozpocząć w zaznaczonym, naciętym miejscu). Wyjąć plaster z opakowania bezpośrednio przed użyciem. Zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejącą plastra i niezwłocznie przykleić plaster w miejscu, odczuwania bólu na bawełnianą bieliznę przylegającą do ciała lub na suchą i czystą skórę. Plaster rozgrzeje się stopniowo do przyjemnej przynoszącej ulgę temperatury około 50°C (temperatura maksymalna około 55°C). Długość czasu stosowania plastra należy dobrać indywidualnie do najlepszego efektu terapeutycznego. Nie należy jednak stosować plastra w tym samym miejscu przez zbyt długi czas. W razie potrzeby kolejny plaster można nakleić w tym samym miejscu po upływie 24 godzin. Plaster mocno trzyma się w miejscu i po użyciu jest łatwy do usunięcia. Plaster można stosować sam lub w połączeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi. Wówczas, z uwagi na zmniejszone odczuwanie bólu, należy stosować plaster wyłącznie na bawełnianą bieliznę. W razie wystąpienia intensywnych potów należy plaster

usunąć.

Ostrzeżenia:

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE2274
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić od światła.

Wytwórca:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Informacja o produkcie:

Polpharma Biuro Handlowe ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa