

Ranisilver, Kadefarm, spray 125 ml



Cena: 47,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Kadefarm
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Ranisilver, spray 125ml

Kwas hialuronowy, srebro mikronizowane, fitokolagen akacjowy.

Właściwości:

Ranisilver spray 125ml ml to wyrób medyczny przeznaczony do wspomagania leczenia ran i powierzchniowych uszkodzeń skóry o ostrym i przewlekłym charakterze.

- kwas hialuronowy, witamina E, oraz fitokolagen akacjowy, dzięki swoim właściwościom nawilżającym i powlekającym, tworzą rezerwę wody, zapewniającą prawidłowe nawilżenie mikrośrodowiska rany. Sprzyjają również przywróceniu i utrzymaniu optymalnego nawodnienia skóry oraz wspomagają prawidłowy przebieg fizjologicznych procesów regeneracji tkanek. Srebro mikronizowane działa jak środek konserwujący.

Skład:

- Kwas hialuronowy, fitokolagen akacjowy, srebro mikronizowane, witamina E, olej migdałowy, silikon, sól glinowa oktenylobursztynianu skrobiowego.

Sposób użycia:

- Oczyszczyć ranę sterylnym roztworem soli fizjologicznej.
- Trzymając pojemnik w pionie, naciśnij zawór dozujący i rozpyl spray na uszkodzoną skórę.
- Aplikuj 2-3 razy dziennie tworząc cienką warstwę proszku na powierzchni rany.
- Stosuj aż do całkowitego wyleczenia.

Środki ostrożności:

- Nie stosować do celów innych niż przewidziane.
- Długotrwałe używanie wyrobu medycznego może wywoływać reakcje nadwrażliwości lub podrażnienia. Wówczas należy zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na rany obejmujące tkankę podskórną.
- Zaleca się unikanie stosowania sprayu Ranisilver z innymi wyrobami medycznymi o działaniu miejscowym. Dopuszcza się tego rodzaju stosowanie wyłącznie w razie rzeczywistej potrzeby i pod nadzorem lekarza.
- Nie używać produktu po upływie daty ważności.
- Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Pojemnik pod ciśnieniem — podgrzanie może skutkować wybuchem.
- Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Nie przekłuwać ani nie podpalać pojemnika nawet po zużyciu.

Przechowywanie:

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła światła i ciepła, unikając niskich i wysokich temperatur.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania lub po terminie ważności.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0477
- Posiada deklarację zgodności UE

- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Objętość netto: 125ml

Wytwórca:

Sakura italia Srl Via Mantova 24, 25017 Lonato del Garda (BS) Włochy

Dystrybutor:

Kadefarm Sp. z o.o. Sierosław ul. Gipsowa 18, 62-080 Tarnowo Podgórne