

Sanity AP1720, Ciśnieniomierz dla dzieci



Cena: 360,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Albert Polska
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Sanity Ciśnieniomierz dla dzieci AP 7120

PRZEZNACZONY DLA DZIECI W WIEKU 3-12 LAT

Ciśnieniomierz DLA DZIECI Sanity® AP 1720 to urządzenie medyczne do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi u dzieci. To pierwszy na polskim rynku ciśnieniomierz automatyczny przeznaczony dla najmłodszych, ponieważ zastosowany sposób pomiaru uwzględnia specyfikę ciśnienia krwi u dzieci.

- Ciśnieniomierz jest wyposażony w odpowiednio małe mankiety, których rozmiary są dostosowane do obwodu ręki najmłodszych pacjentów: 15-18 cm oraz 18-22 cm.
- Urządzenie wykorzystuje nowatorski system podzielonego mankietu (ang. Duo Control Cuff Technology, DCC).
- Każdy mankiety jest zbudowany z 2 części: górnej (większej) i dolnej (mniejszej) komory powietrza, napętnianych oddzielnie, osobnymi przewodami powietrza.
- Górna część mankietu działa standardowo, powodując ucisk ramienia, natomiast dolna komora służy jako stetoskop do wykrywania fal tętna.
- Mierzenie ciśnienia odbywa się pomiędzy uderzeniami serca, za pomocą wielu czujników wewnątrz mankietu.
- Ta metoda zapewnia bardzo dokładne odczyty i jest wyjątkowo delikatna, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci.
- Ciśnieniomierz ma przyjazny kształt zwierzątka, co uatrakcyjnia i ułatwia spokojny pomiar.

Właściwości:

1. Możliwość dobrania mankietu do obwodu ręki dziecka.
2. Możliwość ręcznego dopompowania mankietu.
3. Pamięć 200 pomiarów.
4. Akumulator ładowany przez USB - 1 ładowanie na ok. 200 pomiarów.

Dane techniczne:

- **Zasilanie** - bateria litowa (DC 3,7 V) lub zasilacz prądu zmiennego (wejście: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A, wyjście: 6V, 1A)
- **Pamięć** - 200 pomiarów
- **Rozmiar** - 165 mm x 112 mm x 60 mm
- **Waga** - ok. 350 g (bez baterii)

Sposób pomiaru:

1. Dla uzyskania prawidłowych wyników należy zadbać o prawidłową postawę ciała dziecka. Najlepiej, aby dziecko stabilnie siedziało np. na krześle, ze stopami ułożonymi płasko na podłodze i ramieniem położonym na stole. Ważne jest, aby podczas pomiaru dziecko było spokojne, bez poruszania się i mówienia.
2. Założyć mankiety jak pokazano powyżej - na lewe lub prawe ramię dziecka, w zależności od zaleceń lekarza. Dolna część mankietu powinna znajdować się ok. 1 cm powyżej łokcia, a mankiety i serce powinny być na tym samym poziomie.
3. Po wciśnięciu przycisku START/STOP mankiety zaczną być napełniane powietrzem. Po zakończeniu pomiaru nastąpi szybkie spuszczenie powietrza z mankieta. Zostanie wyświetlone ciśnienie krwi i tętno, a urządzenie automatycznie zapisze wynik.

Zawartość opakowania:

- Automatyczny, naramienny Ciśnieniomierz dla dzieci Sanity®, model AP 1720
- **Zestaw dwóch mankieta:** XS (15-18 cm) oraz S (18-22 cm)
- Bateria litowa.
- Zasilacz.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.

Uwaga:

- Mankiety u dzieci należy zakładać na lewą lub prawą rękę - w zależności specyfiki choroby i zaleceń lekarza.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE0197
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent/Dystrybutor:

Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, 32-410 Doczyce.