

## Sanity EKO Termofor 2L w pokrowcu



Cena: 21,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Albert Polska
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Sanity EKO Termofor 2L w pokrowcu

#### Opis produktu:

Termofor z pokrowcem stosuje się w celach profilaktyczno-leczniczych, do miejscowego ogrzewania ciała.

Termofor gumowy 2 l w pokrowcu to klasyczne rozwiązanie dla osób szukających prostych i naturalnych rozwiązań w domowym leczeniu. **Wysokiej klasy guma** zagwarantuje doskonałą termikę, natomiast pokrowiec zapewni **przyjemny dotyk** dla ciała.

#### Wskazania:

##### Stosowany na zimno:

- Przynosi ulgę w przypadku zwichnięć, guzów, bólów głowy, migren, ukąszeń insektów, lekkich poparzeń

##### Stosowany na ciepło:

- Przynosi ulgę w przypadku kolek pokarmowych u niemowląt
- Dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśniowymi i stawów, poprawia krążenie krwi i działa relaksacyjnie
- Może być stosowany przez matki karmiące do rozgrzewania piersi

## Sposób użycia:

- Upewnij się, że woda jest ciepła, około 50°. Unikaj używania wrzątku lub wody, która może się poparzyć. Po odkręceniu górnej części, stopniowo dodawaj wodę do termoforu, aż osiągnie 3/4 jego zawartości. Podczas napełniania należy trzymać termofor pionowo za szyjkę.
- Aby usunąć nadmiar powietrza, należy lekko przechylić termofor, aż woda zacznie wypływać z wylotu. Dla ułatwienia można umieścić termofor na równej powierzchni.
- Ostrożnie zakręć kran i obróć termofor w dół, aby upewnić się, że jest szczelny. Następnie załóż pokrywę.

## Czyszczenie:

- Do produkcji pokrowca użyto poliestru. W przypadku zabrudzenia należy prać go wyłącznie ręcznie w wodzie z mydłem w temperaturze do 30°C. Do czyszczenia gumowej osłony termicznej należy używać wody z mydłem. Unikaj stosowania środków dezynfekujących.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed użyciem należy sprawdzić szczelność.
- Napełnienie termofora wrzącą wodą może spowodować jego uszkodzenie, dlatego należy tego unikać.
- Termofor napełniony gorącą wodą może spowodować oparzenia.
- Termoforu nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej.
- Niemowlęta i osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych nie powinny korzystać z tego produktu.
- Używać u dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Aby zapobiec pękaniu, nie należy wywierać nadmiernego nacisku (np. siadając na produkcie).
- Podczas użytkowania należy sprawdzać powierzchnię termoforu.
- Obszar ciała, który będzie miał kontakt z termoforem, nie powinien być smarowany maściami zawierającymi oleje lub inne substancje szkodliwe dla gumy.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.
- **Nie stosować produktu po upływie daty ważności na opakowaniu.**

## Producent:

Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, 32-410, Dobczyce.

## Dystrybutor:

Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, 32-410, Dobczyce.