

## Sanity Gruszka XL z kanką nr 11, do zaparc



Cena: 18,18 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Sanity
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Sanity Gruszka XL (Nr 11) z kanką do zaparc - 1 sztuka

#### Opis produktu:

Produkt przeznaczony do wykonywania lewatywy doobytniczej w warunkach domowych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Gruszka dedykowana osobom dorosłym i dzieciom, powyżej 3 roku życia.

#### Wskazania:

- zaparcia
- skurcze jelit
- przewlekłe bóle brzucha
- trudności z wypróżnianiem
- zapalenie jelita grubego
- naloty na języku

- nieprzyjemny oddech
- zapalenie jamy ustnej
- przewlekłe bóle głowy

## Właściwości:

- Usuwa toksyny z organizmu.
- Oczyszcza układ pokarmowy.
- Przynosi ulgę w zaparciach.
- Wspomaga w odchudzaniu.
- Pobudza perystaltykę i mikroflorę jelitową.

## Sposób użycia:

- Przed wykonaniem zabiegu zawsze skonsultuj się z lekarzem.
- Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wymyj każdą część wyrobu z osobna, a następnie zanurz na kilka minut w gotującej się wodzie. Zwróć uwagę na to, aby elementy były zanurzone w całości.
- Po ostudzeniu, napełnij gruszkę płynem do przepłukiwania ciała, o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Kankę nasmaruj cienko wazeliną lub olejem jadalnym i wprowadź delikatnie i powoli do odbytu. Następnie ściśnij gruszkę energicznie, aby opróżnić jej zawartość do ciała. Przed wyjęciem końcówki zaciśnij mocno pośladki, aby płyn nie wydostał się na zewnątrz.

## Środki ostrożności:

- Stosuj zgodnie z przeznaczeniem.
- Produktu nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej.
- Nie należy stosować środków dezynfekujących.
- W razie uszkodzenia jednej z części wyrzucić cały zestaw.

## Ważne:

- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

## Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Podmiot odpowiedzialny:

Albert Polska Sp. z o.o., ul. Obwodowa 4a, Dobczyce.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.