

Seni Lady Slim Normal, wkładki urologiczne, 15 sztuk



Cena: 13,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	TZMO
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Seni Lady Slim Normal, wkładki urologiczne, 15 sztuk

Wskazania:

- Seni Lady Slim Normal to dyskretne, oddychające wkładki urologiczne. Przeznaczone są dla kobiet z kropelkowym i lekkim nietrzymaniem moczu. Zapewniają wysokie poczucie suchości, komfort i wygodę. Dużo bardziej chłonne od zwykłych podpasek. Zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnego zapachu moczu
- rozmiar Normal przeznaczony jest dla kobiet aktywnych z kropelkowym i lekkim stopniem inkontynencji

Rodzaj inkontynencji:

- inkontynencja moczowa

Stopień inkontynencji i poziom chłonności:

- inkontynencja: kropelkowa / lekka
- chłonność: 3/6

Zalety wkładek urologicznych:

- Anatomiczny kształt idealnie dopasowujący się do ciała
- Redukcja nieprzyjemnego zapachu
- Pakowane pojedynczo
- Oddychający materiał
- Łatwe w użyciu
- Dobre mocowanie do bielizny
- Uczucie suchości i ochrona przed przeciekaniem
- Dyskrecja i komfort w jednym
- Dodatkowe zabezpieczenie w postaci bocznych osłonek
- Miękkie i delikatne

Sposób użycia:

- wyjmij wkładkę urologiczną z opakowania i oderwij papier z paska klejowego, umieszczony na spodniej części wkładki
- przyklej wkładkę do bielizny.
- sprawdź, czy wkładka jest przyklejona prosto, aby zapewnić sobie wygodę i komfort podczas jej noszenia
- zużytą wkładkę zwiń i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie wyrzucaj zużytej wkładki do toalety

Uwagi:

- bez lateksu
- produkt jednorazowy
- produkt testowany dermatologicznie
- nie wyrzucaj zużytej wkładki urologicznej do toalety

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny.** Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Wyrób jednorazowego użytku.
- Nie wyrzucać do toalety.
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą.
- Produkt testowany dermatologicznie.
- Wyprodukowano w Polsce.
- Należy pamiętać o odpowiednio dobranym rozmiarze wkładki urologicznej.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temp. poniżej 25oC, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.
- Chronić opakowanie przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Producent:

TZMO SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.