

Seni Man, wkładki urologiczne dla mężczyzn, Light, 14 x 18 cm, Level 1, 15 sztuk



Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	TZMO
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Seni Man, wkładki urologiczne dla mężczyzn, Light, 14 x 18 cm, Level 1, 15 sztuk

Seni® Man Light to wyrób medyczny dedykowany aktywnym mężczyznom z problemem kropelkowego i lekkiego nietrzymania moczu. Posiadają **najniższy stopień chłonności (1/5) oraz najmniejszy rozmiar (Light)**. Ich anatomiczny "trójkątny" kształt zapewnia odpowiednie dopasowanie, a kompaktowy, dyskretny wkład chłonny daje uczucie suchości. Zastosowany wewnątrz produktu superabsorbent wiąże wilgoć w żel i redukuje nieprzyjemny zapach moczu.

- Męskie wkładki urologiczne to produkt przyjazny dla skóry – pozwalają jej swobodnie oddychać, są miękkie i delikatne w dotyku.
- Nie zawierają lateksu, co minimalizuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.
- Dyskrecję stosowania wkładek zapewnia skuteczne działanie ochronne, niewielki rozmiar, a także to, że produkt nie szeleści w czasie stosowania.

Opakowanie Seni® Man Light zawiera 15 jednorazowych wkładek urologicznych dla mężczyzn.

Zastosowanie:

- Wkładki urologiczne dla aktywnych mężczyzn.
- Ochrona i higiena przy kropelkowym i lekkim nietrzymaniu moczu.

Sposób użycia:

- Wkładka przypomina wyglądem ochraniacz bokserski.
- Odklej papierek zabezpieczający i przytwierdź wkładkę do bielizny.
- Wkładkę należy przykleić do dopasowanej (przylegającej do ciała) bielizny typu slipy.

Cechy produktu:

- dla mężczyzn z lekkim i kropelkowym nietrzymaniem moczu,
- o anatomicznym kształcie,
- miękkie i delikatne dla skóry,
- dyskretne (nie szeleszczą),
- niwelują przykry zapach,
- łatwe w użyciu,
- dają uczucie suchości,
- chłonność: 1/5,
- rozmiar Light.

Uwagi:

- bez lateksu
- produkt jednorazowy
- produkt testowany dermatologicznie
- nie wyrzucaj zużytej wkładki urologicznej do toalety
- nie stosuj wkładki, jeśli używasz luźnej bielizny np. bokserek.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny.** Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE

- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą.
- Wyprodukowano w Polsce.
- Należy pamiętać o odpowiednio dobranym rozmiarze wkładki urologicznej.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temp. poniżej 25oC, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.
- Chronić opakowanie przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Producent:

TZMO SA, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.