

Softeye Blepha+ Chusteczki+kompres zestaw

Cena: 37,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Softeye Blepha+ 14 jednorazowych chusteczek + 1 ogrzewalny kompres - 1 Zestaw

Softeye Blepha+ chusteczki okulistyczne z kompresem

Działanie:

- produkt posiada działanie oczyszczające, zmiękczaające, kojące i udrażniające
- przynosi szybką ulgę dzięki zawartości naturalnych składników odkażających i przeciwzapalnych
- w tylnym zapaleniu brzegów powiek dochodzi do zablokowania ujść gruczołów Meiboma. Zastosowanie ciepłego kompresu na oko w połączeniu z masażem powieki umożliwia odblokowanie i oczyszczenie ujść gruczołów. Dzięki temu, mogą one wznowić naturalną produkcję lipidów, niezbędnych do utrzymania w dobrym stanie filmu łzowego

Skład:

•

Woda, PEG/PPG-20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzynian amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol feniloetylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy

•

nie zawiera konserwantów

Zawartość opakowania:

- 14 jednorazowych chusteczek + 1 ogrzewalny kompres

Wskazania:

- przy zapaleniu powiek i spojówek
- przy leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek
- przed i po zabiegach chirurgicznych, jako środek odkażający
- do higieny powiek i rzęs

Stosowanie:

- rozgrzej kompres do momentu zmiany barwy z pomarańczowej na żółtą
- kompres można rozgrzać trzymając go pod gorącą wodą z kranu lub zanurzyć go w gorącej wodzie, do momentu zmiany barwy
- przed wykonaniem masażu oka zawsze należy sprawdzić temperaturę kompresu, przykładając go do wewnętrznej strony nadgarstka. Jeśli jest zbyt gorący, należy odczekać kilka minut i sprawdzić ponownie
- jeśli barwa nie jest jednorodna, potrząśnij kompresem przed użyciem
- trzymając kompres za skrzydełko, masować powiekę z lekkim naciskiem przez 3-5 minut
- bezpośrednio po masażu otworzyć saszetkę i wyjąć chusteczkę
- rozłożyć chusteczkę, zamknąć oczy i delikatnie oczyścić powieki i rzęsy, w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego.
- po użyciu umyć ręce
- należy używać jednej chusteczki na jedno oko
- nie przemywać oka po zastosowaniu produktu

- po użyciu opłukać kompres woda i umieścić z powrotem w opakowaniu

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu
- tylko do użytku zewnętrznego, do stosowania w okolicach oczu, przy zamkniętych powiekach
- każda saszetka przeznaczona do jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie zużytej chusteczki

Przechowywanie:

- nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone
- nie stosować po upływie terminu ważności
- przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci
- przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą
- nie przebijać kompresu i nie połykać produktu
- po wykorzystaniu ostatniej chusteczki wyrzucić kompres

Ważne:

- posiada oznakowanie CE 0477
- posiada deklarację zgodności UE
- zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim

Podmiot odpowiedzialny:

NTC SRL Via Lulgi Razza3, Włochy Mediolan

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.