

## Solwax Active spray do uszu 15ml



Cena: 24,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	SOLINEA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Solwax, Active, spray do uszu, 15 ml

Aktywny tlen

### Wskazania:

- preparat jest zalecany w regularnej higienie uszu, aby zapobiegać tworzeniu się złożeń woskowiny.
- zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia ucha
- zapobiega powstawaniu korka woskowinowego
- gwarancja bezpiecznego stosowania zarówno u dorosłych jak i u dzieci

### Sposób użycia:

- przed użyciem należy buteleczkę ogrzać, trzymając ją w dłoni w pozycji pionowej zbliżyć końcówkę aplikatora do przewodu słuchowego i zaaplikować zgodnie z poniższym:

#### Profilaktycznie:

- 1-2 dawki do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu, aby zapobiec tworzeniu się złożeń woskowinowych.
- przy korku woskowinowym jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, aplikować 1-2 dawki Solvax Active spray 2 razy dziennie przez około 4 dni przed wizytą u lekarza

#### Profilaktycznie dla osób uprawiających sporty wodne:

- rozpylić 1-2 dawki do każdego ucha bezpośrednio po kąpielu
- zabieg ten eliminuje efekt zalegania wody w kanale ucha po kąpielu

Nie należy wprowadzać aplikatora do przewodu słuchowego zewnętrznego zbyt głęboko, jest to szczególnie ważne przy aplikacji u małych dzieci.

Przed użyciem preparatu u dzieci poniżej 12 roku życia należy zasięgnąć porady lekarza

#### Skład:

- gliceryna, glikol propylenowy, nadtlenek karbamidu, woda oczyszczona, wersenian disodowy, kwas winowy, cytrynian sodu, alkohol etylowy

#### Środki ostrożności:

- unikać kontaktu z oczami
- nie należy stosować preparatu w przypadku bolesności ucha, perforacji błony bębenkowej, uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu oraz w przewlekłych stanach zapalnych ucha środkowego i przewodu słuchowego

#### Ciąża i karmienie piersią:

- kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem wyrobu medycznego

#### Interakcje:

- nie stwierdzono

#### Przechowywanie:

- przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej
- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- po zużyciu opakowanie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
- chronić od światła
- po otwarciu preparat należy zużyć w ciągu 6 miesięcy

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim

Zawartość netto: 15 ml

## Producent:

Solinea sp. z o.o. Elizówka ul. Szafranowa 6

## Dystrybutor:

Solinea sp. z o.o. Elizówka ul. Szafranowa 6