

Sterimar Baby aerozol, 100% woda morska, 50 ml



Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Laboratoires Fumouze
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Sterimar Baby Higiena Nosa, spray fizjologiczny do nosa od 0 do 3 lat, 50 ml

Opis produktu:

Sterimar Baby Higiena Nosa to izotoniczny roztwór wody morskiej do nawilżania i codziennej higieny nosa, specjalnie opracowany dla delikatnych nosków dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Preparat jest w 100% naturalny i zawiera mikroelementy o dobroczynnym działaniu takie jak: miedź, mangan, selen, cynk.

Właściwości:

- Delikatnie oczyszcza, usuwa zanieczyszczenia z noska m.in. alergeny, kurz, drobne cząstki pyłu, śluz.
- Nawilża, przywraca naturalną wilgotność błony śluzowej nosa zaburzoną np. przez ogrzewanie, klimatyzację.
- Zapobiega przeziębieniom, poprzez wzmacnianie mechanizmów obronnych błony śluzowej nosa zapobiega schorzeniom laryngologicznym takim jak: przeziębienie, zapalenie zatok, infekcje uszu.
- Usprawnia oddychanie, aby poprawić jakość snu i ułatwić karmienie butelką lub piersią.

Wskazania:

- Dla niemowląt i małych dzieci do nawilżania i codziennej higieny nosa.
- Sterimar można stosować po zabiegach chirurgicznych nosa.

Zalecane stosowanie:

- Od 2 do 6 aplikacji dziennie do każdego otworu nosowego.
- Delikatnie wprowadzić końcówkę aplikatora do nosa i nacisnąć podstawę aplikatora.
- Oczyszczyć końcówkę aplikatora wodą z mydłem, a następnie opłukać i osuszyć.
- Może być stosowany do codziennej higieny nosa przez długi czas.
- Produkt może być aplikowany w każdej pozycji.

Skład:

Izotoniczny roztwór wody morskiej (woda morska 31,82 ml na 100 ml).

Ważne:

- Bez konserwantów.
- Pakowany w warunkach aseptycznych, zapobiegających dostaniu się do niego drobnoustrojów chorobotwórczych.

Przechowywanie:

- Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Chronić przed światłem słonecznym.
- Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 0459
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Objętość netto: 50 ml około 150 aplikacji

Producent:

SOFIBEL-Laboratories Fumouze, 110-114, rue Victor Hugo, 926886 Levallois-Perret, Cedex, Francja.

Dystrybutor:

Biocodex Polska Sp. o.o., ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa.