

## Sutricon, samoprzylepne silikonowe plastry medyczne do pielęgnacji blizn, 3cmx10cm, 5 plastrów



Cena: 74,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Verco
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## Sutricon, samoprzylepne silikonowe plastry medyczne do pielęgnacji blizn, 3cmx10cm, 5 plastrów

### Właściwości:

- Zmniejszają widoczność blizny
- Rozjaśniają i wygładzają bliznę
- Wspomagają leczenie blizn pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych i innych
- Pozwalają "oddychać skórze"
- Zapobiegają nieprawidłowemu bliznowaceni
- Skuteczność i bezpieczeństwo silikonu zostały potwierdzone w badaniach klinicznych
- 95% osób stosujących terapię plastrami Sutricon stwierdziło ich skuteczność
- Cienka i przezroczysta formuła plastra zapewnia wygodę i dyskrecję używania
- Wielkość plastra dostosowana do blizn pooperacyjnych tarczycy, wyrostka, piersi, po operacjach ortopedycznych

## Skład:

- Polidimetylosiloksan.

## Wskazania:

- Wyjątkowe właściwości żelu silikonowego poprawiają wygląd blizn starych i świeżych.
- Silikonowe plastry stosowane są w leczeniu blizn przerostowych (hipertroficznyc), blizn keloidowych (bliznowców) starych i świeżych, w zapobieganiu nieprawidłowemu bliznowaceniu ran zamkniętych.

## Przeciwwskazania:

Plastry Sutricon nie mogą być stosowane na:

- rany otwarte,
- rany sączące
- oparzenia
- błony śluzowe

W przypadku reakcji skórnej należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

## Sposób użycia:

- Przed rozpoczęciem stosowania plastrów Sutricon na świeżą bliznę, należy upewnić się, że rana jest całkowicie zamknięta i nie sączy się z niej żadna wydzielina.
- Przed użyciem dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.
- Wyjąć plaster z opakowania.
- Możliwe jest pocięcie plastra w celu dopasowania jego wielkości do powierzchni blizny.
- Należy upewnić się, że plaster całkowicie zakrywa bliznę, jak również powierzchnię wokół blizny (przynajmniej 0,5 cm z każdej strony blizny).
- Rozpocząć usuwanie folii ochronnej z plastra, przykładając samoprzylepną stroną do brzegu blizny.
- Zdjąć ostrożnie ochronną folię, doklejając cały plaster na bliznę.
- Zaleca się raz dziennie zdjąć plaster, bliznę oczyścić neutralnym mydłem i osuszyć.
- Najlepszy efekt uzyskuje się przy ciągłym noszeniu plastra przez 24 godziny. Plaster należy zmieniać co 3-5 dni, kiedy już nie przywiera do skóry.
- Nie należy używać tego samego plastra przez więcej niż 7 dni.
- W przypadku zastosowania plastra na bliznę znajdującą się w miejscu narażonym na rozciąganie (np. staw kolanowy, staw łokciowy) tak jak w przypadku innych produktów w postaci plastra, może nastąpić jego przemieszczanie i odklejenie.

## Warunki przechowywania:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

## Wytwórca:

M-Technologies, 41 rue des Metissages, 59335 Tourcoing, Francja

## Dystrybutor:

Verco S.A. , Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5 lik. 6U, 01-015 Warszawa