

Sutricon, Żel, silikonowy, na blizny, rozstępy, 15ml



Cena: 34,39 PLN

Opis słownikowy

| | |
|----------------------|---------------------|
| Producent / Marka | Verco |
| Substancja czynna | - |
| Typ produktu | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Wyrób Medyczny

Sutricon Silikonowy, żel na blizny - 15 ml

Opis produktu:

Sutricon, silikonowy żel, 15 ml do codziennej pielęgnacji blizn, hipoalergiczny.

Skład:

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Silica.

Działanie:

Sutricon, silikonowy żel

- do pielęgnacji wszystkich rodzajów blizn
- tuba z kaniulą zapewnia łatwą aplikację i pozwala na stosowanie produktu na nierówne, często poddawane naprężeniom powierzchnie skóry.
- szybko wysycha i tworzy na powierzchni skóry elastyczną, niewidoczną powłokę, która utrzymuje odpowiedni stopień nawilżenia skóry i chroni powierzchnię blizny przed czynnikami zewnętrznymi.
- poprawia wygląd nowych i istniejących już blizn.
- regularnie stosowany pomaga w pielęgnacji blizn oraz zmniejsza ryzyko powstawania bliznowców i blizn przerostowych.

- wspomaga zmniejszenie, rozjaśnienie oraz wygładzenie blizn przy regularnym stosowaniu

Wskazania:

Sutricon, silikonowy żel przeznaczony jest do pielęgnacji:

- blizn pooperacyjnych
- blizn pooparzeniowych i powstałych po urazach
- blizn przerostowych i keloidów (bliznowców)
- blizn potrądzikowych
- rozstępów.

Sposób użycia:

- Stosowanie produktu powinno się rozpocząć jak najszybciej po zagojeniu rany lub zdjęciu szwów.
- Na dokładnie umytą i osuszoną powierzchnię blizny nanieść niewielką ilość preparatu.
- Kolistymi ruchami delikatnie masować powierzchnię blizny przez około 2-3 min.
- Rozcierać bliznę, lekko uciskając ją opuszkami palców.
- Zaleca się stosować preparat minimum dwa razy dziennie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

- Produkt nie powinien być używany przez osoby, u których występuje alergia na którykolwiek ze składników preparatu.
- Do użytku zewnętrznego.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia i reakcji alergicznej należy zaprzestać stosowania preparatu.
- Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i ranami.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent/Dystrybutor:

Verco S.A. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawa.