

# SutriHeal, Forte, 10%, maść, leczenie ran, przyspiesza gojenie ran, antybakteryjny, 15 g



Cena: 28,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Verco
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

## Opis produktu

## Wyrób Medyczny

### SutriHeal Forte 10%, maść do gojenia ran -15 g

#### Opis produktu:

Wyrób medyczny w postaci maści zawierającej naturalną, rafinowaną żywicę świerku norweskiego (*Picea abies*), w której znajdują się związki przyspieszające gojenie się ran. Maść nie zawiera antybiotyku i nie wywołuje odporności.

Preparat przeznaczony do stosowania miejscowego, na zakażone i niezakażone rany.

#### Skład:

Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (*Picea abies*) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid.

#### Działanie:

- Działanie wyrobu związana jest z biologicznymi właściwościami związków znajdujących się w żywicy świerku norweskiego.
- Maść tworzy na powierzchni rany antybakteryjny film, który chroni ranę przed zanieczyszczeniem i wspomaga skuteczne gojenie.

## Wskazania:

- Do miejscowego leczenia zakażonych i niezakażonych ran w warunkach domowych i ambulatoryjnych wszelkich skaleczeń, otarć, pęknięć, oparzeń i owrzodzeń skóry u ludzi.

## Sposób użycia wyrobu medycznego:

W przypadku otarć, pęknięć lub ran postępować jak poniżej:

1. Oczyszczyć i osuszyć ranę.
2. Nałożyć maść bezpośrednio na zmieniony obszar 1-2 razy dziennie.
3. W razie potrzeby zabezpieczyć ranę bandażem lub opatrunkiem przepuszczającym powietrze.
4. Unikać dostania się maści do oczu lub ust.

Maść SutriHeal Forte 10% tworzy na powierzchni rany antybakteryjny film, który chroni ranę przed zanieczyszczeniem i wspomaga skuteczne gojenie. Maść SutriHeal Forte 10% należy nakładać bezpośrednio na zmieniony obszar 1-2 razy dziennie.

Przetoki i rany powstałe na skutek otwarcia pęcherzy należy leczyć zgodnie z zaleceniami pielęgniarki lub lekarza.

## Uwagi i środki ostrożności:

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji użytkowania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub działań niepożądanych należy przerwać stosowanie wyrobu i skontaktować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie stosować, jeśli opakowanie było wcześniej otwierane lub uszkodzone.

## Możliwe działania niepożądane:

- Maści nie należy nakładać na błony śluzowe, do oczu lub jamy ustnej. Nie należy stosować wewnętrznie.
- Maść zawiera substancje, które mogą powodować uczuleniowe reakcje skórne (alergiczne kontaktowe zapalenie skóry) u osób nadwrażliwych na żywicę. Jeśli w trakcie leczenia pojawią się objawy uczuleniowe należy natychmiast przerwać stosowanie maści SutriHeal® Forte 10% i skontaktować się z personelem medycznym.

### Ciąża i karmienie piersią:

- Brak informacji na temat możliwych działań niepożądanych w okresie ciąży i karmienia piersią. Maści SutriHeal Forte 10% nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

### Stosowanie u dzieci i młodzieży:

- Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 3. roku życia.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Posiada oznakowanie CE 0653
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

## Producent:

Help SA 10 Valaoritou St. 14452 Metamorphosis, Attica, Greece.

## Dystrybutor:

Verco S.A. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, 01-015 Warszawa.