

# Sutrisept Hydrożel na rany 100 ml



Cena: 72,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Verco
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Sutrisept, hydrożel na rany, 100 ml

Pierwsza pomoc na rany

#### Wskazania:

- **Sutrisept Hydrożel** na rany to wyrób przeznaczony do ochrony, pielęgnacji i nawilżania ostrych, przewlekłych i zakażonych ran oraz oparzeń I i II stopnia.
- przeznaczony jest do pielęgnacji, ochrony i nawilżania ran zakażonych i niezakażonych.
- zawiera jedyne na rynku połączenie 0,1% PHMB (Poliheksanid) i Poloksameru 188, niejonowego surfaktantu wspierającego leczenie ran
- odkażanie ran
- oparzenia
- rany z infekcją
- rany z biofilmem
- rany przewlekłe (np. owrzodzeń cukrzycowych, owrzodzeń żylnych, odleżyn itp.)
- rany powstałe w wyniku porażenia prądem elektrycznym

- rany powstałe od oparzeń radiacyjnych
- miejsca wprowadzenia cewników urologicznych
- skóra w okolicach stomii, przetoki, ropni

## Działanie:

- bezboleśnie oczyszcza rany i oparzenia, zapobiega zakażeniu rany i przyspiesza jej gojenie.
- tworzy w miejscu nałożenia warstwę ochronną i mechanicznie zapobiega przyleganiu mikroorganizmów do obszaru rany.
- **SutriSept Hydrożel** nie wpływa na opóźnianie procesu gojenia się rany, dzięki czemu może być nałożony na dno rany na okres kilku dni. W tym czasie zapewnia odkażanie poprzez regularne oczyszczanie, nawilżanie i wytworzenie warstwy ochronnej na ranie. Ponadto utworzona cienka warstwa ochronna stanowi barierę pomiędzy powierzchnią rany a opatrunkiem, minimalizuje przywieranie opatrunku do powierzchni rany oraz ogranicza wzrost drobnoustrojów osiedlających się na powierzchni opatrunku. W ten sposób wzrasta skuteczność opatrunku.

## Skład:

- 0,1% PHMB (Poliheksanid), Poloksamer, woda oczyszczona i substancje pomocnicze

## Sposób użycia:

- całą ranę jak i jej okolice należy oczyścić SutriSept Płyn na rany.
- oczyszczoną ranę należy pokryć dużą ilością SutriSept w Gel Hydrożel na rany.
- hydrożel można stosować bezpośrednio na ranę, jak również na bandaż i gazę.
- odpowiednio zabandażować ranę.
- hydrożel może pozostać na powierzchni rany do następnej zmiany opatrunku.
- przy zmianie opatrunku pozostałość hydrożelu należy wypłukać płynem SutriSept .
- SutriSept w Gel Hydrożel na rany wykazują kompatybilność ze wszystkimi opatrunkami na rany.

## Przeciwwskazania:

Nie stosować Sutrisept Gel w przypadku:

- operacji chrząstki szklistej i aseptycznych operacjach stawów, w uchu środkowym i wewnętrznym oraz nie można go aplikować do oczu
- nie stosować jeżeli u pacjenta rozpoznano lub podejrzewana jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników wyrobu
- nie nadaje się do stosowania w obrębie ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowych
- nie nadaje się do stosowania z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, mydłami oczyszczającymi, kremami, olejkami, enzymami należy całkowicie usunąć z powierzchni rany przed zastosowaniem wyrobu.
- nie stosować w pierwszych czterech miesiącach ciąży.

## Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.
- okres trwałości nieotwartego wyrobu wynosi 3 lata przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej nieprzekraczającej 25°C
- chronić przed światłem i innymi źródłami ciepła.
- po otwarciu zużyć w ciągu 8 tygodni.
- nie stosować jeżeli uszczelka pod nakrętką jest zerwana lub uszkodzona

## Środki ostrożności:

- tylko do użytku zewnętrznego na skórę
- nie wolno podawać we wlewach dożylnych ani iniekcjach.
- może wywoływać reakcje alergiczne.
- pacjenci nadwrażliwi na którykolwiek ze składników nie powinni stosować wyrobu
- nie połykać

## Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE 2195
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
- **Produktu nie wolno połykać**
- Unikać kontaktu z oczami.

Objętość netto: 100 ml

**Producent:**

ACTO GmbH Germany

**Dystrybutor:**

Verco S.A., Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6 U, 01-015 Warszawa