

Tantum Rosa, irygator do higieny intymnej, 500 ml



Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Tantum Rosa, irygator do higieny intymnej, 500 ml

Irygator Tantum Rosa to wyrób medyczny przeznaczony do higieny intymnej kobiet. Preparat służy do wykonywania płukania pochwy.

Skład:

- produkt wykonany został z elastycznego plastiku
- 1 plastikowy zbiornik z korkiem oraz aplikator

Zastosowanie:

- Irygator do higieny intymnej Tantum Rosa służy do wykonywania płukania pochwy,
- Regularna higiena pochwy pomaga w zachowaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej pochwy. Dodatkowo zabieg może odpowiednio uzupełniać zalecane przez lekarza leczenie stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych, wywołanych przez infekcje intymne, podrażnienie mechaniczne lub w profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii
- Tantum Rosa Irygator jest bezpieczny, wykonany z elastycznego i gładkiego plastiku

- Irygator może być użyty wielokrotnie
- Irygator przeznaczony jest do używania przez jedną kobietę

Sposób użycia:

- Płyn do irygacji należy przygotować używając wody o temperaturze ciała. Należy napełnić zbiornik przygotowanym roztworem w ilości 500 ml.
- Na zbiornik nakręcić końcówkę irygatora (aplikator).
- Ostrożnie wprowadzić końcówkę irygatora (aplikator) do pochwy najgłębiej jak jest to możliwe. Zbiornik należy trzymać dwoma rękoma, kciuki należy ułożyć na korku przy końcówce irygatora (aplikatorze). Naciskając zbiornik doprowadzić do jego opróżnienia. Jeżeli jest to możliwe irygację należy wykonać w pozycji leżącej, najlepiej w pustej wannie, lub stojącej - np. pod prysznicem. Dla bezpieczeństwa i wygody zaleca się wykonanie irygacji w bezpiecznej i stabilnej pozycji, z ewentualnym wykorzystaniem wkładki antypoślizgowej. Można również wykonać irygację w pozycji siedzącej na bidecie lub sedesie
- Delikatnie wyjąć końcówkę irygatora (aplikator) z pochwy nie dopuszczając do rozprężenia się zbiornika, aby nie wsysać do zbiornika wydzieliny z pochwy.
- Ze zbiornika odkręcić końcówkę irygatora (aplikator). Obie części umyć w ciepłej (do 40°C) wodzie i odstawić do osuszenia.

Środki ostrożności:

- Uwaga żadnej części irygatora nie należy myć w zmywarce.
- Nie sterylizować Nie podgrzewać powyżej 40°C.
- Nie stosować żrących środków do dezynfekcji.
- Nie stosować roztworów środków drażniących oraz środków powierzchniowo czynnych (detergentów).
- Irygator dopochwowy jest przeznaczony do użytku indywidualnego.
- Kobiety, które nie rozpoczęły życia seksualnego nie powinny stosować irygatora, gdyż jego użycie może spowodować przerwanie błony dziewiczej.
- Każdy poważny incydent, który ma miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają siedzibę.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent:

Pentaferte Italia S.r.l. Viale Piane Nocella 23, 64012 Campi (TE), Włochy

Dystrybutor w Polsce:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 1818, 02-222 Warszawa,