

Tantum Rosa Irygator do higieny intymnej 500ml



Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Angelini
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Tantum Rosa irygator, 1 plastikowy zbiornik z korkiem oraz aplikator

Irygator Tantum Rosa to wyrób medyczny przeznaczony do higieny intymnej kobiet. Preparat służy do wykonywania płukania pochwy.

Skład:

- produkt wykonany został z elastycznego plastiku
- 1 plastikowy zbiornik z korkiem oraz aplikator

Zastosowanie:

- Irygator do higieny intymnej Tantum Rosa służy do wykonywania płukania pochwy, pomocny w miejscowym stosowaniu roztworów dopochwowych
- Regularna higiena pochwy pomaga w zachowaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej pochwy. Dodatkowo zabieg może odpowiednio uzupełniać zalecane przez lekarza leczenie stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych, wywołanych przez infekcje intymne, podrażnienie mechaniczne lub w profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii

- Do podmywania i zachowania odpowiedniej higieny okolic intymnych
- Jako wspomaganie leczenia grzybicy pochwy
- Podczas infekcji intymnych w ciąży
- Na pieczenie pochwy
- Jako przygotowanie do zabiegów ginekologicznych jak i po jego wykonaniu

Sposób użycia:

- Płyn do irygacji należy przygotować używając wody o temperaturze ciała
- Następnie napełnić zbiornik przygotowanym roztworem w ilości 500 ml
- Na zbiornik nakręcić końcówkę irygatora (aplikator)
- ostrożnie wprowadzić końcówkę irygatora (aplikator) do pochwy, najgłębiej jak jest to możliwe
- zbiornik należy trzymać dwoma rękoma, kciuki należy ułożyć na korku przy końcówce irygatora (aplikatorze)
- Naciskając zbiornik doprowadzić do jego opróżnienia
- Jeżeli jest to możliwe irygację należy wykonać w pozycji leżącej (najlepiej w pustej wannie) lub stojącej (np. pod prysznicem)
- Dla bezpieczeństwa i wygody zaleca się wykonanie irygacji w bezpiecznej i stabilnej pozycji, z ewentualnym wykorzystaniem wkładki antypoślizgowej
- Można również wykonać irygację w pozycji siedzącej - na bidecie lub sedesie
- Delikatnie wyjąć końcówkę irygatora (aplikator) z pochwy nie dopuszczając do rozprężenia się zbiornika, aby nie wsysać do zbiornika wydzieliny z pochwy
- Ze zbiornika odkręcić końcówkę irygatora (aplikator)
- Obie części umyć w ciepłej (do 40°C) wodzie i odstawić do osuszenia

Środki ostrożności:

- produkt osobisty, nie powinien być używany przez więcej niż jedną osobę
- nie należy prowadzić irygacji u dziewcząt, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia seksualnego, gdyż może ona spowodować przerwanie błony dziewiczej
- irygatora nie należy sterylizować, podgrzewać do temperatury powyżej 40°C, myć w zmywarce, czy dezynfekować żrącymi środkami

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny.

- Posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Podmiot odpowiedzialny:

Pentaferte Italia S.r.l. Viale Piane Nocella 23 64012 Campli (TE), Włochy