

Test ciążowy Pink-test płytkowy 1 sztuka



Cena: 3,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hydrex
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Pink test ciążowy płytkowy - 1 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

Opis produktu:

Test ciążowy płytkowy na obecność hCG w moczu jest szybkim testem ciążowym, który łatwo można wykonać samodzielnie. Test wykrywa obecność gonadotropiny kosmówkowej (hCG), która pojawia się w moczu już we wczesnej fazie ciąży

- Wyrób przeznaczony jest do diagnostyki in vitro, wyłącznie do użytku zewnętrznego
- Wyrób do samokontroli
- Po wykonaniu testu nie należy podejmować żadnych działań o charakterze medycznym bez uprzedniej konsultacji z lekarzem
- Dokładny - wiarygodność testu wynosi 99%
- Szybki - wynik w ciągu 2-5 minut
- wykrywa obecność hCG przy stężeniu 20 mIU/ml

- Wygodny - do użytku o każdej porze dnia

Działanie:

- Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest hormonem wytwarzanym przez rozwijającą się łożysko wkrótce po zapłodnieniu i jest wydalany w moczu. Test ciążowy zawiera przeciwciała, które w swoisty sposób reagują z tym hormonem. W momencie zakroplenia próbki moczu do miejsca na próbkę moczu na płytce testowej, działanie kapilarne powoduje przemieszczenie próbki przez membranę. Z chwilą gdy hCG w próbce dotrze do obszaru membrany, w którym zachodzi reakcja, pojawi się kolorowa linia. Brak obecności kolorowej linii w obszarze testowym (T) wskazuje na negatywny wynik testu. W ramach procedury kontrolnej, jeżeli test został przeprowadzony prawidłowo, w strefie kontrolnej (C) pojawi się kolorowa linia

Zawartość zestawu testowego:

- 1 test płytkowy
- pipeta
- pochłaniacz wilgoci
- instrukcję używania wyrobu

Uwaga:

- **Wewnątrz torebki foliowej znajdują się pochłaniacz wilgoci, który służy wyłącznie w celu zabezpieczenia testu w czasie przechowywania i nie jest stosowany w badaniu**

Kiedy wykonać test:

- test może być wykonany o każdej porze dnia. Zaleca się jednak pobranie pierwszej, porannej próbki moczu, ponieważ stężenie hormonu hCG jest wtedy najwyższe
- Próbkę moczu należy pobrać do czystego, suchego pojemnika. **(zestaw nie zawiera pojemnika)**

Jak wykonać test:

zanim przeprowadzisz test zebrać próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika ze szkła lub plastiku

- wyjmij foliową torebkę z opakowania testu
- rozerwij torebkę wzdłuż nacięcia i wyjmij płytkę testową i pipetkę
- zanurz końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu
- ściskając szeroką część pipetki nabierz próbkę moczu
- trzymając pipetkę z próbką moczu pionowo nad okienkiem
- umieść w nim 3 krople moczu
- po 2-5 minutach odczytaj wynik, a następnie wyrzuć test

- Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekaj jeszcze 1 minutę. **Nie bierz pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut**

Interpretacja wyników:

Wynik pozytywny - CIAŻA

Jeżeli w okienku kontrolnym (C) oraz w okienku testowym (T) pojawiły się linie (nawet jeżeli któraś z linii jest mniej wyraźna) oznacza to, że jesteś w ciąży. Intensywność zabarwienia linii może się zmieniać z uwagi na zróżnicowany poziom hCG na różnych etapach ciąży.

Wynik negatywny - BRAK CIAŻY

Jeżeli linia pojawiła się tylko w okienku kontrolnym (C) oznacza to, że nie jesteś w ciąży. Jeżeli przypuszczasz, że jednak jesteś w ciąży (np. brak miesiączki) badanie można powtórzyć kilka dni później przy użyciu nowego testu.

Wynik nieważny

Wynik uznajemy za nieważny jeśli :

- Pojawi się linia tylko w oknie testowym (T) i nie pojawi się w oknie kontrolnym (C)
- Nie pojawi się żadna linia w oknie testowym (T) oraz w oknie kontrolnym (C). W obu przypadkach wynik uznajemy za błędny, a test należy powtórzyć przy użyciu nowego zestawu.

Uwaga:

Jeżeli kolor w obszarze testowym jest słabo widoczny, zaleca się powtórzenie badania po 48 godzin.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze 2-30 stopni w zamkniętym woreczku foliowym do upłynięcia daty ważności. Data ważności zestawu znajduje się na opakowaniu handlowym i etykiecie.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, wilgoci i źródeł ciepła.
- Nie zamrażać.
- Wskazane jest otwieranie torebki foliowej tuż przed użyciem testu.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent:

- Hydrex Diagnostics Sp. z o.o Sp. k.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.