

Test Covid-19 MILA Antygenowy (wymaz)



Cena: 27,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	MILAPHARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

UWAGA!!! DATA WAŻNOŚCI: 2023.11.30 r.

Mila SARS-CoV-2 Szybki test antygenowy wymaz z nosa - 1 sztuka

WYRÓB MEDYCZNY CE1434 DO SAMOKONTROLI Z INSTRUKCJĄ W JĘZYKU POLSKIM

Wskazania do wykonania testu:

- Gorączka
- Zmęczenie
- Suchy kaszel
- Utrata węchu i smaku
- Bóle mięśni

MilaCOVID-19 Właściwości:

Mila SARS-CoV-2 Test Antygenowy (wymaz z nosa) to **jednorazowy** zestaw testowy przeznaczony do wykrywania SARS-CoV-2, który wywołuje COVID-19, za pomocą samodzielnie pobranej próbki wymazu z nosa od osób z objawami, u których podejrzewa się zakażenie

COVID-19. Wyniki dotyczą wykrywania antygenów białka nudeokapsydu SARS- -CoV-2. Antygen jest na ogół wykrywalny w próbkach z górnych dróg oddechowych podczas ostrej fazy infekcji. Pozytywne wyniki wskazują na obecność antygenów wirusowych, ale korelacja z historią pacjenta i innymi informacjami diagnostycznymi jest niezbędna do określenia statusu zakażenia. Pozytywne wyniki wskazują na obecność SARS-CoV-2. Osoby, u których wynik testu jest pozytywny, powinny się izolować i szukać dodatkowej opieki u swojego lekarza. Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub koinfekcji innymi wirusami. Negatywne wyniki nie wykluczają zakażenia SARS-CoV-2. Osoby, u których wynik testu jest negatywny i nadal występują objawy podobne do COVID, powinny zwrócić się o dalszą opiekę do swojego lekarza.

Sposób użycia:

Krok 1. Zdejmij pokrywę probówki z buforem do ekstrakcji i umieść probówkę w uchwycie probówki w pudełku.

Krok 2: Wymaz z nosa - Pobieranie.

- Należy wyjąć sterylną wymazówkę z torebki.
- Następnie włóż wymazówkę do nozdrza, aż poczujesz lekki opór (około 2 cm w górę nosa). Powoli przekręć wymazówkę, pocierając nią wewnątrz nozdrza (5-10 razy o ścianę nosa).
- Delikatnie wyjmij wymazówkę.
- Używając tej samej wymazówki, powtórz krok 2 w drugim nozdrzu.
- Wyjmij wymazówkę z nozdrza.

Krok 3: Przygotowanie próbki

- Umieść wymazówkę w probówce ekstrakcyjnej, upewnij się, że dotyka dna i poruszaj nią, aby dobrze wymieszać. Dociśnij końcówkę wymazówki do probówki, a następnie obracaj wymazówką przez 10-15 sekund.
- Wyjmij wymazówkę, jednocześnie dociskając jej główkę do wnętrza probówki ekstrakcyjnej. Umieść wymazówkę w torebce bezpieczeństwa biologicznego.
- Zamknij zatyczkę probówki ekstrakcyjnej.

Krok 4: Testowanie.

- Wyjmij kasetę testową z zapieczętowanej torebki foliowej i użyj jej w ciągu godziny. Najlepsze wyniki uzyskasz, jeśli test zostanie wykonany natychmiast po otwarciu torebki foliowej. Umieść kasetę testową na płaskiej i równej powierzchni.
- Otwórz małą zatyczkę, odwróć probówkę do ekstrakcji i zaaplikuj 3 krople pobranej próbki do okienka testowego (S) kasety testowej. Następnie uruchom stoper. Nie przesuwaj kasety testowej podczas wywoływania testu.
- Odczytaj wynik po 15 minutach. Nie odczytuj wyniku po 20 minutach.

Opakowanie zawiera:

- Kasetę testową
- Sterylną wymazówkę
- Bufor do ekstrakcji
- Torba bezpieczeństwa biologicznego

- Instrukcja użycia produktu w języku polskim.

Ważne:

- Ten test jest przeznaczony do użytku domowego.
- Należy umyć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund przed i po wykonaniu testu.
- Jeśli mydło i woda nie są dostępne, należy użyć środka do dezynfekcji rąk z co najmniej 60% zawartością alkoholu.
- Po zakończeniu testu wszystkie elementy należy umieścić w plastikowej torbie bezpieczeństwa biologicznego i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Importer:

Milpharm Sp. z o.o., pl. Gen. J. Hallera 5/14A, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.