


# Test na infekcje intymne pH test HYDREX

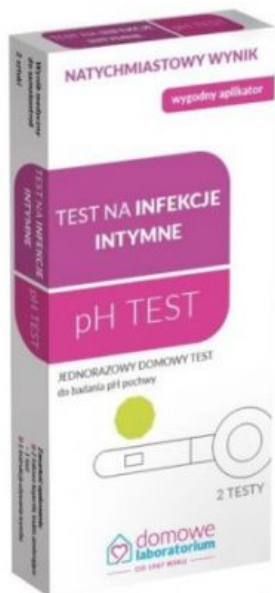

Cena: 9,90 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Test pH na infekcje intymne - 2 sztuka

TEST DO SAMOKONTROLI

#### Opis:

Pasek do pomiaru pH umieszczony w aplikatorze **pod wpływem kontaktu z wydzieliną znajdującą się w pochwie zmienia zabarwienie w zależności od poziomu pH**. Umożliwia on określenie czy pH w pochwie pacjentki mieści się w zakresie:

- **Poprawnym** (pH = 4,0 - 4,4, kolor wskaźnika żółty),
- **Niepoprawnym** (pH = 4,4 - 7, kolor wskaźnika ciemniejszy, o odcieniu zielono-niebiesko-brązowym), co sprzyja występowaniu infekcji lub przedwczesnego porodu.

#### Wskazania:

Wyrób medyczny zalecany jest do stosowania:

- W przypadku stwierdzenia objawów zapalnych okolic pochwy (świąd, pieczenie, zaczerwienienie, upławy),
- W celach profilaktycznych w okresie ciąży,
- W trakcie stosowania hormonalnej terapii zastępczej w okresie okołomenopauzalnym,
- Po antybiotykoterapii
- Przed i po wszelkiego rodzaju zabiegach chirurgicznych obejmujących strefy intymne.

## Sposób użycia:

- Dokładnie umyj ręce.
- Wyjmij aplikator z folii.
- Usiądź na muszli sedesowej z szeroko rozstawionymi kolanami lub stań w lekkim rozkroku.
- Wolną ręką delikatnie rozszerz ujście pochwy, ostrożnie rozsuwając wargi sromowe.
- Wprowadź aplikator do pochwy na głębokość około 2,5 cm, przyciskając polem testowym w kierunku odbytu.
- Po upływie 10 sekund ostrożnie wyjmij produkt z pochwy.
- Porównaj barwę na powierzchni testowej ze skalą pH umieszczoną na opakowaniu.

Jeśli wynik odbiega od normy należy powtórzyć test po kilku godzinach lub następnego dnia, gdyż wiele czynników ma wpływ na poziom pH. Jeśli następny test także pokaże wynik nieprawidłowy i będą mu towarzyszyć następujące objawy: pieczenie, świąd, nadmierna ilość wydzieliny, nieprzyjemny zapach, podejrzenie uwalniania się płynu owodniowego, plamienia lub krwawienie, objawy zbliżone do menstruacji lub gorączka należy bezwzględnie zgłosić się do lekarza.

## Zawartość opakowania:

- 2 foliowe kopertki, każda zawierająca: 1 test.
- 1 instrukcja używania wyrobu.

## Uwagi:

- W celu poprawnego przeprowadzenia badania koniecznie należy się zapoznać z załączoną do opakowania instrukcją obsługi.
- Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Opakowanie z testem należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać.
- Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone, ponieważ wilgoć z powietrza mogła uszkodzić test.
- Test jest przeznaczony tylko do jednokrotnego użycia.
- Zużyty test usunąć jak każdy inny odpad domowy.
- Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi oraz interfejs użytkownika w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

## Producent:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.