

Test narkotykowy ze śliny 1 szt. domowe laboratorium



Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

TEST NARKOTYKOWY ZE ŚLINY - 1 SZTUKA

DOMOWE LABORATORIUM

WYKRYWA 6 NARKOTYKÓW SZYBKI I WIARYGODNY WYNIK

TEST DO SAMOKONTROLI

Opis:

Test narkotykowy ze śliny to najprostszy i najszybszy sposób wykrycia nielegalnych substancji w organizmie.

Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie narkotykami przez coraz młodsze osoby, nowoczesne testy domowego użytku stanowią świetne narzędzie diagnostyczne. Dzięki nim możemy szybko i wygodnie zbadać ślinę naszego dziecka czy bliskiej nam osoby, pod kątem obecności nielegalnych środków odurzających.

Narkotykowy TEST ze śliny pozwala na wykrycie aż **6 różnych substancji psychoaktywnych, w tym amfetaminy, kokainy, heroiny, morfiny, marihuany i haszyszu.**

Zawartość opakowania:

- Płytki testowa,
- Próbnik,
- Pojemnik na próbkę.

Stosowanie:

- W celu przeprowadzenia badania należy pobrać ślinę z ust za pomocą próbniaka mającego postać specjalnej gąbki.
- Następnie ślinę musimy wycisnąć do pojemnika wyposażonego w nakrętkę z dozownikiem, z którego trzeba wprowadzić po 3 krople śliny, do każdego z dwóch pól reakcyjnych znajdujących się na płytce testowej.

Wyniki testu odczytujemy **po 10 minutach**, ich wiarygodność utrzymuje się do 20 minut, po tym czasie nie należy już interpretować uzyskanych rezultatów. Dodatni wynik oznacza się jako jeden barwny prążek widniejący w strefie kontrolnej C, co jednoznacznie świadczy o wykryciu śladu narkotyku w organizmie badanej osoby.

Obecność narkotyków:

- **Morfina, heroina i kokaina** w ślinie wykrywana jest przez 12-24 godziny od zażycia narkotyków,
- **Amfetamina** 20-50 godzin,
- **Marihuana i haszysz** ok. 14 godzin.

Uwaga:

Aby wykonywane badanie było jak najbardziej rzetelne, należy pamiętać o kilku zasadach:

- Ślina do badania może być pobrana o dowolnej porze dnia.
- Badanie należy przeprowadzić niezwłocznie po pobraniu śliny.
- Każdy krok powinien być zgodny z instrukcją.
- 10 minut przed rozpoczęciem badania należy powstrzymać się od spożywania posiłków, żucia gumy oraz palenia tytoniu.

Ważne:

- Informacje na opakowaniu oraz w instrukcji używania wyraźnie wskazują, że wyrób medyczny przeznaczony jest do samokontroli.
- Posiada oznakowanie CE 1434
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.

Producent:

- Hydrex Diagnostics Sp. z o.o., Sp. k., ul. T. Zana 4, Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.