

Test S3 choroby intymne 3w1 kobieta, mężczyzna 1 sztuka



Cena: 92,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	FARMABOL SP. Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny do samokontroli

Test S3 Szybki test na choroby przenoszone drogą płciową - 1 sztuka

Candida Albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis.

TEST DO SAMOKONTROLI

Test antygenowy typu 3w1, do samodzielnego wykonania w domu zarówno przez kobiety jak i mężczyzn. Materiał badawczy stanowi próbka moczu, najlepiej porannego, kiedy stężenie poszczególnych bakterii jest największe.

Działanie:

- Zasada działania polega na określeniu jakościowym antygenu Candida Albicans, Trichomonas Vaginalis i Gardenella vaginalis na urządzeniu testującym - kasetka. Test służy do różnicowej diagnostyki. W zależności od wizualnego wyniku można określić jakiego pochodzenia jest zakażenie.
- Test należy do grupy testów szybkich - wynik w 15 minut. Nie zaleca się odczytu testu po upływie 30 minut, gdyż wilgoć może zmienić jego wynik.

Zawartość opakowania:

Opakowanie zawiera zestaw do jednorazowego wykonania testu: urządzenie testujące w postaci kasetki, zakraplacz, miseczkę na mocz, probówkę z buforem ekstrakcyjnym. Opakowanie i dokładna instrukcję w języku polskim.

Wskazania:

Według informacji WHO choroby zakaźne przenoszone drogą płciową są najczęstszymi przyczynami poważnych schorzeń i niosą za sobą trudne konsekwencje w obszarze zdrowia publicznego. Brak wczesnej diagnozy i leczenia chorób wywołanych przez bakterie, których środowiskiem namnażania są drogi płciowo-moczowe, skutkuje poważnymi konsekwencjami: **niepłodność, uszkodzenia płodu, infekcje noworodków, ciąża pozamaciczna, nowotwory, a w skrajnych przypadkach śmierć.**

Najczęściej występujące zakażenia pochodzą od **Candida albicans (wywołuje kandydozę), Trichomonas vaginalis (wywołuje rzęsistkowicę pochwową) oraz Gardnerella vaginalis (odpowiada za bakteryjne zakażenie pochwy).**

Objawy zarażenie poszczególnymi bakteriami, mimo iż są swoiste, to trudne do zidentyfikowania bez odpowiedniej diagnostyki.

Do najczęstszych należą: **świąd, pieczenie, zaczerwienienie, upławy, nieprzyjemny zapach, ból podczas stosunku płciowego, ból podczas oddawania moczu.**

Na zakażenia bakteryjne narażony jest każdy, niezależnie od płci. Często jednak typowe objawy dotyczą kobiet, a mężczyźni (choć następstwa chorobowe są dla nich groźne) są nieświadomymi nosicielami.

Stosowanie:

- zbierz mocz do pojemnika na mocz
- otwórz fioletową nakrętkę probówki
- pobrać 0,5ml moczu zgodnie z oznaczeniem skali na górze zakraplacza
- dodać mocz do probówki z fioletową nakrętką zawierającą 0,5ml buforu
- zamknij nakrętkę i dobrze wymieszaj przez około 5-6 sekund
- wyjmij kasetkę testową z woreczka foliowego
- zdejmij bezbarwną końcówkę fioletowej nakrętki
- umieść 3-4 krople mieszanki moczu w obszarze "S" kasetki testowej
- poczekaj 15 minut
- interpretuj wynik

Dokładność:

- Testy wykazują się wysoką dokładnością ocenianą na podstawie parametrów:
- Dla **Trichomonas vaginalis**: czułość : 100%; swoistość : 99%; **dokładność : 99,5%**
- Dla **Candida albicans**: czułość : 95,5%, swoistość : 98,4%; **dokładność : 96,7%**
- Dla **Gardnerella vaginalis**: czułość : 95,1%; swoistość: 98%; **dokładność: 96,7%**
- Proste testy do domowej samokontroli są ważnym ogniwem w prawidłowym leczeniu.
- Testy są łatwo dostępne, łatwe do wykonania i bardzo czułe, dzięki czemu wynik jest klarowny i pewny.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

- Wyrób medyczny przeznaczony do samokontroli - posiada oznakowanie CE 0123
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

Producent:

Jei Daniel (JD) Biotech Corp. A201, 1ST Building, No.69, Hua Yang RD. China.

Importer:

Farmabol Sp. z o.o., ul. T. Ociepki 4, 34-600 Limanowa.