

## ThermaCare Kompresy rozgrzewające na dolne okolice pleców i stawy biodrowe, 4 sztuki

Cena: 38,99 PLN



### Opis słownikowy

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Producent / Marka | Angelini            |
| Substancja czynna | -                   |
| Typ produktu      | Wyrób medyczny inny |

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

## ThermaCare Kompresy rozgrzewające na dolne okolice pleców i stawy biodrowe, 4 sztuki

ThermaCare to kompresy samorozgrzewające przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i stawów związanych z:

- napięciem mięśni,
- nadmiernym wysiłkiem,,
- przeciążeniami,
- nieprawidłową postawą,
- zapaleniem stawów.

### Sposób użycia:

- Rozewij saszetkę z kompresem bezpośrednio przed użyciem. Czas jaki kompres ThermaCare potrzebuje, aby osiągnąć temperaturę terapeutyczną może wynosić do 30 minut.
- Umieść kompres ThermaCare w miejscu bólu, ciemniejszymi komórkami cieplnymi skierowanymi w stronę skóry. Osoby w wieku 55 lat lub starsze powinny zakładać kompres ThermaCare na warstwę ubrania (lub materiału), tak aby kompres nie przylegał bezpośrednio do skóry.

- Nie stosować dłużej niż przez 8 godzin w okresie 24 godzin.
- Nie używać ponownie.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- Osoby w wieku 55 lat i starsze: Ryzyko poparzeń skóry rośnie wraz z wiekiem. Osoby w wieku 55 lat lub starsze powinny zakładać kompres ThermaCare na warstwę ubrania lub materiału, tak aby kompres nie przylegał bezpośrednio do skóry. Nie należy stosować kompresu podczas snu.
- Ten produkt może powodować oparzenia i (lub) pęcherze skórne.
- Podczas jego stosowania należy często kontrolować stan skóry.
- W przypadku stwierdzenia podrażnienia lub oparzenia, należy natychmiast usunąć kompres.
- Osoby z cukrzycą, problemami z krążeniem, chorobą serca, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem kompresu.

**Nie należy używać kompresu:**

- w przypadku stwierdzenia wycieku zawartości komórek cieplnych lub jeśli kompres jest uszkodzony lub rozdarty
- jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę)
- na zmienioną chorobowo, podrażnioną lub uszkodzoną skórę
- w miejscu siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin
- u osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu
- na obszary ciała z zaburzonym czuciem temperatury
- z innymi produktami emitującymi ciepło (np. poduszkami grzewczymi, plastrami rozgrzewającymi itp.)
- u osób które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresu, w tym u dzieci, niemowląt i niektórych osób w podeszłym wieku.

**Należy zaprzestać stosowania kompresu i skonsultować się z lekarzem w przypadku:**

- wystąpienia uczucia dyskomfortu, pieczenia lub pojawienia się obrzęku, wysypki lub innych zmian na skórze, które utrzymują się podczas stosowania kompresu
- nasilenia dolegliwości bólowych lub utrzymywania się bólu po 7 dniach stosowania kompresu.
- Każda komórka ciepła zawiera żelazo (ok. 2 gramów). W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli dojdzie do kontaktu zawartości komórki ciepłej ze skórą lub oczami, należy usunąć kompres, przemyć dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Nigdy nie należy podgrzewać produktu w kuchence mikrofalowej ani próbować go podgrzać powtórnie, ponieważ kompres może się zapalić.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

**Ważne informacje podczas używania ThermaCare rozgrzewające kompresy na dolne okolice pleców i stawy biodrowe:**

- Nie należy wywierać dodatkowego nacisku na produkt, np. opierać się o twarde powierzchnie, nosić pod obcisłą odzież lub paskiem.
- Jeśli okład wydaje się zbyt gorący, należy przestać go używać lub założyć na warstwę ubrania, tak aby nie przylegał bezpośrednio do skóry.
- Przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) należy usunąć kompres, aby uniknąć zwiększonego ryzyka poparzeń.

## Uwaga:

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Jeśli okład wydaje się zbyt gorący, należy przestać go używać lub założyć na warstwę ubrania, tak aby nie przylegał bezpośrednio do skóry.
- Przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) należy usunąć kompres, aby uniknąć zwiększonego ryzyka poparzeń.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny
- Posiada oznakowanie CE 1639
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.
- Wyrób medyczny do jednorazowego użytku.
- Ten produkt nie zastąpi leków.

## Producent:

Angelini Pharma INC. 1231 Wyandotte Dr., Albany Georgia, 31705, USA.

## Dystrybutor:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.

