

ThermaCare, Kompresy rozgrzewające, plecy biodra, 2 sztuki



Cena: 31,49 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Angelini Pharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób Medyczny

ThermaCare Kompresy rozgrzewające na dolne okolice pleców i stawy biodrowe - 2 sztuki

Właściwości:

- ThermaCare to kompresy samorozgrzewające przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i stawów związanych z:
 - napięciem mięśni,
 - nadmiernym wysiłkiem,,
 - przeciążeniami,
 - nieprawidłową postawą,
 - zapaleniem stawów.

Sposób użycia:

1. Rozerwij saszetkę z kompresem bezpośrednio przed użyciem. Czas jaki kompres ThermaCare potrzebuje, aby osiągnąć temperaturę terapeutyczną może wynosić do 30 minut.
2. Umieść kompres ThermaCare w miejscu bólu, ciemniejszymi komórkami cieplnymi skierowanymi w stronę skóry. Osoby w wieku 55 lat lub starsze powinny zakładać kompres ThermaCare na warstwę ubrania (lub materiału), tak aby kompres nie przylegał bezpośrednio do skóry.

3. Nie stosować dłużej niż przez 8 godzin w okresie 24 godzin.

4. Nie używać ponownie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Osoby w wieku 55 lat i starsze: Ryzyko poparzeń skóry rośnie wraz z wiekiem. Osoby w wieku 55 lat lub starsze powinny zakładać kompres ThermaCare na warstwę ubrania lub materiału, tak aby kompres nie przylegał bezpośrednio do skóry. Nie należy stosować kompresu podczas snu.
- Ten produkt może powodować oparzenia i (lub) pęcherze skórne.
- Podczas jego stosowania należy często kontrolować stan skóry.
- W przypadku stwierdzenia podrażnienia lub oparzenia, należy natychmiast usunąć kompres.
- Osoby z cukrzycą, problemami z krążeniem, chorobą serca, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem kompresu.

Nie należy używać kompresu:

- w przypadku stwierdzenia wycieku zawartości komórek cieplnych lub jeśli kompres jest uszkodzony lub rozdarty
- jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę)
- na zmienioną chorobowo, podrażnioną lub uszkodzoną skórę
- w miejscu siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin
- u osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu
- na obszary ciała z zaburzonym czuciem temperatury
- z innymi produktami emitującymi ciepło (np. poduszkami grzewczymi, plastrami rozgrzewającymi itp.)
- u osób które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresu, w tym u dzieci, niemowląt i niektórych osób w podeszłym wieku.

Należy zaprzestać stosowania kompresu i skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- wystąpienia uczucia dyskomfortu, pieczenia lub pojawienia się obrzęku, wysypki lub innych zmian na skórze, które utrzymują się podczas stosowania kompresu
- nasilenia dolegliwości bólowych lub utrzymywania się bólu po 7 dniach stosowania kompresu.
- Każda komórka ciepła zawiera żelazo (ok. 2 gramów). W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli dojdzie do kontaktu zawartości komórki cieplnej ze skórą lub oczami, należy usunąć kompres, przemyć dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Nigdy nie należy podgrzewać produktu w kuchence mikrofalowej ani próbować go podgrzać powtórnie, ponieważ kompres może się zapalić.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Ważne informacje podczas używania ThermaCare rozgrzewające kompresy na dolne okolice pleców i stawy biodrowe:

- Nie należy wywierać dodatkowego nacisku na produkt, np. opierać się o twarde powierzchnie, nosić pod obcisłą odzieżą lub paskiem.
- Jeśli okład wydaje się zbyt gorący, należy przestać go używać lub założyć na warstwę ubrania, tak aby nie przylegał bezpośrednio do skóry.
- Przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) należy usunąć kompres, aby uniknąć zwiększonego ryzyka poparzeń.

Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE 1639
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.