

ThermaCare, Kompresy rozgrzewające, szyja ramiona nadgarstki, 2 sztuki

Cena: 27,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Angelini Pharma
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Therma Care Kompresy rozgrzewające szyję, ramiona i nadgarstki - 2 sztuki

Właściwości:

- ThermaCare to kompresy samorozgrzewające przeznaczone do łagodzenia bólów mięśni i/lub stawów związanych z:
 - napięciem mięśni
 - nadmiernym wysiłkiem
 - przeciążeniami
 - nieprawidłową postawą
 - zapaleniem stawów.

Sposób użycia:

- Rozerwij saszetkę z kompresem bezpośrednio przed użyciem.
- Czas jaki kompres ThermaCare potrzebuje, aby osiągnąć temperaturę terapeutyczną może wynosić do 30 minut.
- Oderwij papier, aby odsłonić stronę klejącą.
- Zachowaj ostrożność podczas nakładania na nadgarstek - należy uważać, aby komórki ciepłe nie nachodziły na siebie.
- Kompresu nie należy używać dłużej niż przez 8 godzin w okresie 24 godzin.
- Nie używać ponownie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Osoby w wieku 55 lat i starsze: Ryzyko poparzeń skóry rośnie wraz z wiekiem. Osoby w wieku 55 lat lub starsze nie powinny stosować kompresu ThermaCare podczas snu.
- Ten produkt może powodować oparzenia i (lub) pęcherze skórne. Podczas jego stosowania należy często kontrolować stan skóry. W przypadku stwierdzenia podrażnienia lub oparzenia, należy natychmiast usunąć kompres.
- Osoby z cukrzycą, problemami z krążeniem, chorobą serca, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem kompresu.

Nie należy używać kompresu:

- w przypadku stwierdzenia wycieku zawartości komórek ciepłych lub jeśli kompres jest uszkodzony lub rozdarty,
- jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę),
- na zmienioną chorobowo, podrażnioną lub uszkodzoną skórę,
- w miejscu siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin,
- u osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu,
- na obszary ciała z zaburzonym czuciem temperatury z innymi produktami emitującymi ciepło (np. poduszkami grzewczymi, plastrami rozgrzewającymi itp.),
- u osób które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresu, w tym u dzieci, niemowląt i niektórych osób w podeszłym wieku.

Należy zaprzestać stosowania kompresu i skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- wystąpienia uczucia dyskomfortu, pieczenia lub pojawienia się obrzęku, wysypki lub innych zmian na skórze, które utrzymują się podczas stosowania kompresu
- nasilenia dolegliwości bólowych lub utrzymywania się bólu po 7 dniach stosowania kompresu.
- Każda komórka ciepła zawiera żelazo (ok. 2 gramów).
- W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Jeśli dojdzie do kontaktu zawartości komórki ciepłej ze skórą lub oczami, należy usunąć kompres, przemyć dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
- Nie należy podgrzewać produktu w kuchenke mikrofalowej ani próbować go podgrzać powtórnie, ponieważ kompres może się zapalić.

Uwaga:

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Jeśli okład wydaje się zbyt gorący, należy przestać go używać lub założyć na warstwę ubrania, tak aby nie przylegał bezpośrednio do skóry.
- Przed poddaniem się badaniu rezonansem magnetycznym (MRI) należy usunąć kompres, aby uniknąć zwiększonego ryzyka poparzeń.

Ważne:

- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE1639.
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.