


## Tick Twister, Kleszczołapki do usuwania kleszczy

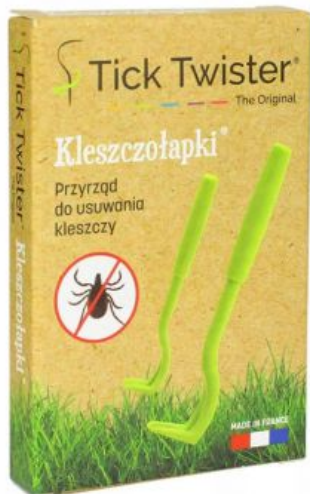

Cena: 12,90 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Portica s.c.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### Kleszczołapki Tick Twister Usuwanie kleszczy - 2 sztuki

#### Opis produktu:

Tick Twister Kleszczołapki to narzędzie, dzięki któremu bezpiecznie usuniesz kleszcza, minimalizując ryzyko zakażenia.

Kleszcze to pajęczaki, które mogą być (ale nie muszą) nosicielami, tzw. wektorami, wielu niebezpiecznych chorób, np. kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), boreliozy, anaplazmozy, riketsjozy i wielu, wielu innych. Prawidłowe usuwanie tego pasożyta jest jednym z elementów profilaktyki chorób odkleszczowych i może przesądzić o tym, czy zachorujesz.

#### Właściwości:

- Z jednakową skutecznością usuwa wszystkie kleszcze bez względu na ich wielkość i umiejscowienie.
- Nie rozrywa kleszcza i nie pozostawia części jego ciała w skórze.
- Nie ściska jego odwłoka, co minimalizuje ryzyko zakażenia patogenami.
- Działa szybko i jest prosty w obsłudze.
- Umożliwia samodzielne i bezpieczne usunięcie pasożyta.

- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa, odpornego na środki dezynfekujące.
- Możliwość sterylizacji np. w autoklawie (temperatura do 140°) lub przez wygotowanie.
- Niełamliwy, wytrzymały, można go używać w nieskończoność.
- Używany i doceniany przez lekarzy.

Haczyk TICK TWISTER® Kleszczołapki® pozwala uchwycić kleszcza bez ściskania i usunąć go ruchem obrotowym. To najlepszy sposób samodzielnego pozbycia się pasożyta w całości i bezpiecznie.

Nasze haczyki do usuwania kleszczy to przyrząd opracowany przez praktyka, francuskiego lekarza weterynarii, Denis Heitz'a. To nie tylko proste narzędzie, ale również niezawodne i bezpieczne rozwiązanie, stosowane od wielu lat przez ludzi na całym świecie. TICK TWISTER® Kleszczołapki® mogą być stosowane do usuwania kleszczy zarówno z ciała ludzi, dorosłych i dzieci, jak i zwierząt (psów, kotów, koni itp.).

## Stosowanie:

1. Dobierz haczyk w zależności od wielkości kleszcza.
2. Wsuń go od strony bocznej kleszcza, jak najbliżej skóry.
3. Przekręć haczyk (w dowolną stronę) aż kleszcz się wysunie (1-3 obroty).
4. Miejsce wkłucia i haczyk należy zdezynfekować.

W opakowaniu znajdują się 2 haczyki. Mały do małych kleszczy i trudno dostępnych miejsc oraz duży do kleszczy dużych.

## Podmiot odpowiedzialny:

Portica s.c. Pow 25, Łódź.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.