

URGO Drobne Rany, Leczenie powierzchniowych małych ran, 3,25 ml



Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	URGO SP.Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

URGO Drobne Rany, Leczenie powierzchniowych małych ran, 3,25 ml

Wyrób medyczny

Przewidziane zastosowanie

Gotowy do użycia opatrunek w płynie do leczenia powierzchniowych małych ran (skaleczeń).

Formuła produktu tworzy idealne warunki do gojenia się ran. Po aplikacji tworzy się dyskretny i elastyczny film, który:

- CHRONI przed czynnikami zewnętrznymi
- ŁAGODZI ból
- WSPOMAGA GOJENIE
- Jest WODOODPORNY

Sposób użycia

W przypadku osób poniżej 16. roku życia produkt musi być aplikowany przez osobę dorosłą. Zaaplikować za pomocą szpatułki tak, aby wypełnić i pokryć w całości uszkodzoną skórę. Pozostawić do wyschnięcia na kilka sekund. Czynność powinna być powtarzana 2-3 razy dziennie, aż do całkowitego wygojenia. Zamknąć szczelnie po użyciu.

W razie konieczności film można usunąć poprzez aplikację niewielkiej ilości preparatu na istniejący film i natychmiastowe starcie warstwy suchym płatkim. Skład preparatu zapewnia higienę i nie ma konieczności czyszczenia pędzelka. Preparat należy zużyć w przeciągu 6 miesięcy od otwarcia.

Przeciwwskazania

Nie używać na zainfekowane rany, w przypadku infekcji grzybiczych, oparzeń i ran krwawiących. Nie stosować bezpośrednio na błonę śluzową (zwłaszcza ust). Z uwagi na brak danych, nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Środki ostrożności

Aplikować wyłącznie na skórę. Preparat powinien być aplikowany przez osoby dorosłe. Do stosowania na drobne rany. Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia. Palenie tytoniu w trakcie aplikacji, w czasie schnięcia preparatu lub w pobliżu otwartej butelki jest wzbronione. W trakcie aplikacji może pojawić się pieczenie. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z farmaceutą. Nie połykać. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Działa drażniąco na oczy. Preparat może być stosowany przez diabetyków po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie

- Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
- Przechowywać z dala od ognia i iskier, w temperaturze poniżej 25°C.

Skład

Triticium vulgare, nitroceluloza, alkohol izopropylowy, octan etylu, alkohol, hydroksypropyloceluloza, Ricinius communis.

Producent: Laboratoires URGO HEALTHCARE - 42, rue de Longvic – 21300 Chenôve - France

Dystrybutor: URGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

Kluczula:

To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie

Ważne:

- **Wyrób medyczny.**
- Posiada oznakowanie **CE2274**
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.