

URGO Oparzenia i rany powierzchniowe 5 x 5 6 sztuk



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	URGO SP.Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Urgo oparzenia i rany powierzchniowe Uśmierza ból i goi 5 x 5

Opis produktu:

•

URGO Siateczka na oparzenia i rany powierzchniowe opakowanie 6 sztuk to gotowa do użycia, sterylna siateczka z opatentowaną technologią lipido-koloidową (TLC). Skuteczność TLC została potwierdzona w badaniach klinicznych.

Opatrunek składa się z cienkiej poliestrowej siateczki nasączonej cząstkami hydrokoloidu oraz wazeliny.

Działanie:

- Leczy oparzenia I i II stopnia oraz rany powierzchniowe.
- Szybko uśmierza ból.
- Przyspiesza gojenie – hydrokoloid w kontakcie z wysiękiem z rany tworzy lipidowo-koloidowy żel. Dzięki temu powstają

odpowiednie warunki do gojenia rany w wilgotnym środowisku.

- Umożliwia **bezbolesne usunięcie opatrunku** – cząsteczki wazeliny zapobiegają przywieraniu opatrunku do rany.
- **Dopasowana do wielkości rany** - możliwość docięcia siateczki lub ułożenia siateczek jedna obok

Stosowanie:

- W przypadku oparzenia powierzchniowego drugiego stopnia:

Na początek schłodzić ranę zimną wodą przez 15 minut, aby zapobiec rozszerzeniu oparzenia.

- We wszystkich przypadkach:

Oczyścić ranę roztworem antyseptycznym nie zawierającym alkoholu. Przemyć wodą lub solą fizjologiczną. W przypadku oparzenia nigdy nie stosować barwnych roztworów antyseptycznych takich jak eozyna. Starannie osuszyć przy użyciu sterylnego kompresu. W miarę możliwości zadbać o to, by powstały pęcherz nie pękł, ponieważ chroni on ranę przed zakażeniem. W przypadku pęknięcia pęcherza, zdezynfekować ranę. Nie należy usuwać warstwy martwego naskórka jeżeli nie zejdzie samoczynnie.

Oderwać folię ochronną. Nałożyć na ranę. Opatrunek w postaci siateczki w razie potrzeby można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru przy pomocy czystych, zdezynfekowanych nożyczek, a następnie przykryć drugim opatrunkiem takim jak rozciągliwa opaska lub plaster. Stosowanie kremu przed nałożeniem opatrunku jest zbędne. Czas stosowania opatrunku to zazwyczaj od 5 do 6 dni, przy czym pierwszy opatrunek należy zmienić po 24 godzinach, a kolejne co 48 godzin.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować na głębokie oparzenia drugiego stopnia, oparzenia trzeciego stopnia oraz na oparzenia twarzy. W powyższych przypadkach konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny:

Polfa Łódź

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.