

Urgo, Plastry na pęcherze, duży rozmiar, 5 sztuk



Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Urgo Flictene Plastry na pęcherze duże - 5 sztuk

EFEKT PODWÓJNEJ MASY HYDROKOLOIDOWEJ

Opis produktu:

Rozmiar: 7,2 x 4,3 cm

Urgo ultradyskretne plastry na pęcherze z podwójną masą hydrokolidową działają, jak druga skóra. Absorbują wydzielinę powstającą w pęcherzu, tworząc żelową poduszczkę ochronną, która: natychmiast łagodzi ból, przyspieszają gojenie, chronią ranę, działając jak druga skóra, przynoszą długotrwałą ulgę i ochronę.

Działanie:

- Natychmiast łagodzi ból.
- Przyspieszają gojenie.
- Chronią ranę, działając jak druga skóra.

Właściwości:

- Specjalnie zaprojektowane i niezwykle odporne plastry znakomicie pokrywają średnie pęcherze, dopasowują się do kształtu stopy, skutecznie eliminują bolesne pęcherze.
- URGO ultradyskretne plastry na pęcherze z podwójną masą hydrokoloidową chronią skórę przed uciskiem i otarciami, natychmiast łagodząc ból.
- URGO ultradyskretny plaster w kontakcie z pęcherzem tworzy ochronny hydrokolidowy żel regenerujący skórę, który sprzyja szybszemu gojeniu się rany.
- Specjalnie zaprojektowane wytrzymałe i bardzo dyskretne plastry umożliwiają noszenie odkrytego obuwia.

Stosowanie:

- Nie przekuwaj pęcherza.
- Jeśli pęcherz jest już przebity, oczyść go wodą i mydłem oraz zastosuj środek antyseptyczny.
- Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem Plastra URGO na Pęcherze.
- Usuń przezroczystą folię ochronną (oznaczoną strzałkami), unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Ogrzej plaster w dłoniach, po czym usuń warstwę ochronną.
- Pozostaw plaster aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągaj go wzdłuż skóry, aż całkowicie się odklei.
- Zmieniaj plaster tak często jak to konieczne.

Podmiot odpowiedzialny:

Polfa Łódź

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.