

URGO Resistant Neutral, Opatrunek do cięcia 1 m x 8cm



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	URGO SP.Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

URGO Resistant Neutral Opatrunek do cięcia 1 m x 8cm

Materiał opatrunkowy

URGO Resistant to włókninowe opatrunki, które sprawdzą się we wszystkich sytuacjach:

- Z wytrzymałej, rozciągliwej tkaniny
- Mikro - perforowane podłoże: pozwala skórze oddychać
- Nieprzywierające, nie przyklejają się do rany

Sposób użycia:

- Oczyszczyć, zdezynfekować, przemyć i starannie osuszyć ranę oraz jej okolice.
- Ostrożnie nałożyć opatrunek, starannie wygładzając krawędzie.

- Zmieniać opatrunek co najmniej 2 razy dziennie i po każdej kąpieli

Informacje dotyczące wyrobu medycznego:

- W przypadku ciała obcego w ranie, znacznego krwawienia, ugryzienia, użądlenia, zranienia ostrym lub zabrudzonym przedmiotem lub jeśli w ciągu 6 dni nie nastąpiła poprawa należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Aby obniżyć ryzyko infekcji lub reakcji skórnych należy ściśle przestrzegać instrukcji stosowania.
- Nie stosować ponownie zużytego opatrunku.
- Nie stosować na oczy, delikatną skórę oraz błony śluzowe.
- Nie stosować po upływie terminu ważności lub gdy produkt jest uszkodzony.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE**
- Posiada deklarację **zgodności UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta

Producent:

Laboratoires Urgo Healthcare - 42 rue de Longvic - 21300 Chenove - France

Dystrybutor:

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa