

Urgo Urgostrips, Paski sterylne do zamykania ran, 10 sztuk



Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	URGO SP.Z O.O.
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

Urgo Urgostrips Paski sterylne do zamykania ran 10 sztuk

Opis produktu:

Urgostrips, paski do zamykania ran, sterylne, 100 mm x 6 mm

- Paski przeznaczone są do nieinwazyjnego zamykania ran oraz nacięć chirurgicznych.
- Preparat pozwala na estetyczne gojenie się ran.
- Rozmiar 100 x 6 mm.

Działanie:

- Ułatwia oraz przyspiesza proces gojenia się ran.
- Hipoalergiczne nie podrażniają skóry.
- Izolują i zabezpieczają ranę przed bakteriami.
- Gwarantują prawidłową regenerację skóry.

- Nie przepuszczają wilgoci.
- Pozwalają na estetyczne gojenie się ran.
- Paski zmniejszają ryzyko powstawania blizn.

Właściwości:

Sterylny samoprzylepny pasek chirurgiczny Urgostrips wspomaga estetyczny proces gojenia rany, dzięki wysokiej wytrzymałości na rozierwanie, dużej elastyczności i wysokiej tolerancji skórnej.

Stosowanie:

- Naklej dwa paski równolegle do brzegów rany.
- Naklej trzeci pasek prostopadle do brzegu rany i delikatnie pociągnij, tak by zbliżyć brzegi rany.
- Przyklej równolegle do tego opatrunku resztę pasków, tak aby zasklepić całą ranę.
- Wzmocnij opatrunek przyklejając dwa kolejne paski na wierzchu.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować na zanieczyszczone ani krwawiące rany.
- Aby zapobiec zakażeniu rany, należy przykryć opatrunkiem antyseptycznym.
- Nie zdejmować ani nie zmieniać pasków przy każdej zmianie opatrunku. Pozostawić na miejscu do zagojenia (3 do 4 dni jeżeli rana nie będzie ropy i jeżeli paski nie odkleją się) i wymienić wyłącznie jeżeli będą odstawać i nie będą spełniać swojej funkcji.
- Nie stosować na oczy.
- Nie stosować na stawy (ryzyko naprężenia i porwania paska). Zastosowanie produktów tłustych, takich jak krem czy maść, może mieć niekorzystny wpływ na przyczepność.
- Jeżeli konieczne będzie cięcie pasków, należy użyć nożyczek zdezynfekowanych alkoholem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Ważne:

- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE 0459**.
- Posiada deklarację **zgodności UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.