

Urgo Zniszczone paznokcie lakier do paznokci 3,3 ml



Cena: 43,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Urgo, zniszczone paznokcie przez grzybicę i urazy, 3,3 ml

LECZY REGENERUJE I CHRONI PAZNOKCIE DOTKNIĘTE GRZYBICĄ

URGO na Zniszczone Paznokcie przez Grzybicę i Urazy to leczniczy plaster w płynie, który:

- Leczy zmiany paznokcia od pierwszych oznak
- **Wnika** w strukturę paznokcia, **chroniąc go** przed ponownymi zmianami
- **Regeneruje i wzmacnia** paznokieć, efekty widoczne wraz z odrastaniem paznokcia
- **Wygoda oraz łatwość stosowania**, aplikacja 1x dziennie
- W porównaniu do innych preparatów dostępnych na rynku **możliwość stosowania u dzieci od 3. roku życia**
- **Odbudowuje i chroni** strukturę paznokcia przed ponownymi zmianami.
- **Chroni paznokieć** przed czynnikami mikrobiologicznymi, fizycznymi (wilgoć, uderzenia) oraz chemicznymi (detergenty, rozpuszczalniki).

- Regeneruje paznokcie po hybrydzie.

Opatentowana technologia HPCH, Octopiroks:

- **Hydroksypropylchitosan (HPCH)** - wzmacnia strukturę paznokcia.
- **Octopiroks** - działa antybakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo.

Właściwości:

- Jest niewidoczny, bezzapachowy, szybkoschnący.
- Nie wymaga użycia pilnika do usunięcia produktu.
- Wystarczy 1 aplikacja dziennie.

Sposób użycia:

- Na oczyszczone i suche paznokcie nałóż produkt w taki sam sposób jak lakier do paznokci.
- Nadmiar lakieru należy usunąć przecierając szczoteczką o brzeg butelki.
- Nałóż produkt na powierzchnię paznokcia, na otaczającą skórę i wokół otwartej krawędzi paznokcia.
- Dla optymalnego działania, aplikuj preparat co najmniej raz dziennie, rano po umyciu rąk.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE
- Posiada deklarację zgodności UE
- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim
- Zawiera etykietę w języku polskim
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.

- Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

Producent:

Laboratoires URGO HEALTHCARE, FRANCE

Dystrybutor:

URGO Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa