

## UrgoClean Ag, opatrunek 15 x 20cm, 1 sztuka



Cena: 67,30 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	Emplastry antimicrobiotica
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

## Wyrób medyczny

### UrgoClean Ag opatrunek z matrycą ze srebrem - 1 opatrunek ( z opakowania 10 sztuk)

Rozmiar: 15 x 20 cm

### Opis produktu:

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością.

- Opatrunek UrgoClean Ag, występuje w postaci sterylnej, włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezynością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan).
- Opatrunek ten wykorzystuje wiązania cieplne w celu powiązania włókien poliakrylanu, które są ułożone równolegle do powierzchni rany w uporządkowany sposób. Dzięki temu, produkt UrgoClean Ag posiada charakterystyczne właściwości pochłaniania i zatrzymywania tkanek martwiczych z rany oraz wykazuje odporność na rozciąganie.
- Wkładka o właściwościach hydro-oczyszczających pokryta jest miękką, przylegającą matrycą gojącą impregnowana srebrem. Matryca TLC-Ag zapewnia ochronę przeciwbakteryjną i z łatwością zamienia się w żel, pomagając w ten sposób w drenażu resztek martwiczych.

## Wskazania:

Opatrunek UrgoClean Ag jest wskazany do miejscowego leczenia przewlekłych (owrzodzeń kończyn dolnych, odleżyn, owrzodzeń stopy cukrzycowej) i ostrych (oparzeń, ran pourazowych, ran chirurgicznych) ran z wysiękiem zagrożonych zakażeniem lub objawami miejscowej infekcji, począwszy od stadium oczyszczanie.

## Działanie:

- Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, matryca TLC-Ag tworzy żel doprowadzając do stworzenia wilgotnego środowiska sprzyjającego gojeniu się rany. Równocześnie włókna o właściwościach hydro-oczyszczających, pochłaniają wysięki tworzą żel. Włókna te wiążą tkanki martwicze, pochłaniając je i drenując, wspomagając ich eliminację (autolityczne oczyszczanie rany).
- Wiązanie i drenaż tkanek martwiczych przez strukturę hydro-oczyszczającą UrgoClean Ag połączoną z matrycą gojącą ze srebrem (TLC-Ag) wpływa korzystnie na oczyszczanie rany z tkanek martwiczych, pomagając również w opanowaniu niewielkich krwawień (np. powstałych wskutek mechanicznego lub chirurgicznego lusuwania tkanek martwiczych).
- Dodatkowo, jony Ag+ nadają opatrunkowi UrgoClean Ag działanie przeciwbakteryjne, które może zmniejszać ilość bakterii w okolicach rany.
- Dzięki odporności na rozciąganie hydro-oczyszczających włókien, opatrunek może być zdejmowany w jednej części. Utworzony żel nie przywiera do rany, co pozwala na łatwe zdejmowanie opatrunku z niewielkim uszkodzeniem, lub bez uszkodzenia gojących się tkanek, bezbolesne lub z niewielkim bólem.

## Sposób użycia:

### Przygotowanie rany:

1. Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem, następnie przepłukać roztworem soli fizjologicznej.
2. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoClean.
3. Zastosowanie opatrunku UrgoClean nie zastępuje mechanicznego oczyszczenia rany, o ile jest konieczne.

### Nakładanie opatrunku:

1. Zdjąć folię ochronną.
2. Przyłożyć miękką, przylegającą stronę opatrunku UrgoClean do rany i jej obrysu.
3. Opatrunek UrgoClean można przyciąć jałowymi nożyczkami, aby w razie potrzeby dostosować wielkość opatrunku do rany.
4. Przykryć opatrunek UrgoClean drugim opatrunkiem odpowiednim dla położenia rany i ilości wysięku.
5. Zmiana opatrunku: Opatrunki UrgoClean należy zmieniać co 1 do 2 dni w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych, a następnie w miarę potrzeby (nie rzadziej niż co 7 dni), w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany. Cały niewykorzystany opatrunek należy zutylizować zgodnie z miejscową praktyką.

## Przeciwwskazania:

- Potwierdzona nadwrażliwość na srebro.

- Nie stosować UrgoClean Ag jako gąbki chirurgicznej do silnie krwawiących ran.
- Nie stosować opatrunku UrgoClean Ag w skojarzeniu z nadtlenkiem wodoru, środkami antyseptycznymi będącymi organicznymi związkami rtęci ani z heksamidyną.
- Nie stosować u pacjentów poddawanych diagnostyce obrazowej metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

## Ostrzeżenia

- Leczenie opatrunkiem UrgoClean Ag należy prowadzić pod kontrolą lekarską.
- Zastosowanie opatrunku nie wyklucza odpowiedniego systemowego leczenia przeciwbakteryjnego zainfekowanej rany zgodnie z lokalnie przyjętymi i standardami.
- Miękka, przylegająca matryca gojąca ze srebrem (TLC-Ag) zawarta w opatrunku UrgoClean Ag przykleja się do lateksowych rękawic chirurgicznych. Dlatego i należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się opatrunkiem, unikając kontaktu z miękka, przylegającą stroną lub posługując się sterylnymi szczypcami. Nie zaleca się równoczesnego stosowania z innymi miejscowymi terapiami.
- Unikać kontaktu z elektrodami i żelami przewodzącymi w trakcie pomiarów elektronicznych, np. EEG i EKG.
- Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia powinni być świadomi faktu, że istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące długotrwałego i wielokrotnego stosowania I opatrunków zawierających srebro, w szczególności u dzieci i noworodków. Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie produktu u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, nie jest zalecane.
- Opakowanie pojedyncze, przeznaczone do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie zapewniające sterylność nie zostało uszkodzone.
- Nie sterylizować ponownie opatrunku. Zutilizować zgodnie z obowiązującą praktyką. Cały niewykorzystany opatrunek należy zutilizować.
- Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

## Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławić ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

## Ważne:

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
- Wyrób medyczny - **posiada certyfikat CE 2797**
- Posiada deklarację **zgodności UE**.

- Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w języku polskim.
- Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta