

UrgoClean, opatrunek 15 x 20cm, 1 sztuka



Cena: 39,14 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	Emplastri antimicrobiotica
Typ produktu	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Wyrób medyczny

UrgoClean opatrunek - 1 opatrunek (z opakowania 10 sztuk)

Rozmiar: 15 x 20 cm

Opis produktu:

Produkt dostępny jest z refundacją z przepisu lekarza (przy określonych wskazaniach), lub bez recepty za pełną odpłatnością.

Wskazania:

Opatrunek **UrgoClean** jest wskazany w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych:

- przewlekłych ranach z wysiękiem (owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej),
- ranach z potencjalnymi tkankami martwiczymi: ranach ostrych (oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe),
- ranach pooperacyjnych, ranach nowotworowych.

Działanie:

- Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, cząstki lipidowo-koloidowe z warstwy TLC tworzą żel, stwarzając wilgotne środowisko korzystne dla oczyszczania rany z tkanki martwiczej.
- Równocześnie wysokochłonne włókna poliakrylanu tworzą żel i wiążą tkanki martwicze, pochłaniając je i drenując, wspomagając ich eliminację (autolityczne oczyszczanie).
- Wiązanie i drenaż tkanek martwiczych przez strukturę wysokochłonną **UrgoClean** połączoną z warstwą TLC sprzyja fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych i wysięku.

Właściwości:

- Pochłanianie wysięku, tworzenie żelu i drenaż tkanek martwiczych w fazie oczyszczania.
- Pochłanianie i wiązanie bakterii przez wysokochłonne włókna poliakrylanu.
- Utrzymywanie wilgotnego środowiska w zetknięciu z raną sprzyjające gojeniu oczyszczonych stref.
- Do opanowania niewielkich krwawień.
- Zdejmowanie opatrunku w jednej części dzięki oporności na rozciąganie wysokochłonnnych włókien.
- Bezbolesne zdejmowanie bez uszkodzania ran i ochrona otaczającej skóry dzięki miękkiej, przylegającej warstwie TLC.

Sposób użycia:

1. Przygotowanie rany:

- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem, następnie przepłukać roztworem soli fizjologicznej.
- Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku **UrgoClean**.
- Zastosowanie opatrunku **UrgoClean** nie zastępuje mechanicznego oczyszczenia rany, o ile jest konieczne.

2. Nakładanie opatrunku:

- Zdjąć folię ochronną.
- Przyłożyć miękką, przylegającą stronę opatrunku **UrgoClean** do rany i jej obrysu.
- Opatrunek **UrgoClean** można przyciąć jałowymi nożyczkami, aby w razie potrzeby dostosować wielkość opatrunku do rany.
- Przykryć opatrunek **UrgoClean** drugim opatrunkiem odpowiednim dla położenia rany i ilości wysięku.

3. Zmiana opatrunku:

- Opatrunki **UrgoClean** należy zmieniać co 1 do 2 dni w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych, a następnie w miarę potrzeby (nie rzadziej niż co 7 dni), w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.
- Cały niewykorzystany opatrunek należy zutylizować zgodnie z miejscową praktyką.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na **UrgoClean**.
- Nie stosować **UrgoClean** jako gąbki chirurgicznej w silnie krwawiących ranach.

Ostrzeżenia

- Miękka, przylegająca warstwa TLC opatrunku **UrgoClean** przykleja się do lateksowych rękawic chirurgicznych. Z tego powodu należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się opatrunkiem, unikając kontaktu z miękką, przylegającą stroną lub posługując się sterylnymi kleszczykami.
- Nie zaleca się równoczesnego stosowania kremu, płynu, maści ani emulsji.
- Ze względu na nieokluzyjny charakter tego opatrunku, opatrunek **UrgoClean** można stosować na zakażone rany pod ścisłą kontrolą lekarską.
- W trakcie procesu oczyszczania rany z tkanek martwiczych rana może wydawać się większa. Dzieje się tak z powodu skutecznego usuwania tkanek martwiczych.
- Opatrunek **UrgoClean** nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Nie sterylizować ponownie opatrunku.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie zapewniające sterylność nie zostało uszkodzone. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Opakowanie pojedyncze, sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.

Przechowywanie:

- przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
- produkt sterylny. Nie stosować, jeżeli opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie wyjąławić ponownie
- wyłącznie do użytku zewnętrznego

Podmiot odpowiedzialny:

Urgo Laboratoires 42 rue de Longvic, Francja Chenove

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.